


MANUALE D'USO E DI MANUTENZIONE

ERCOLINA DOPPIA

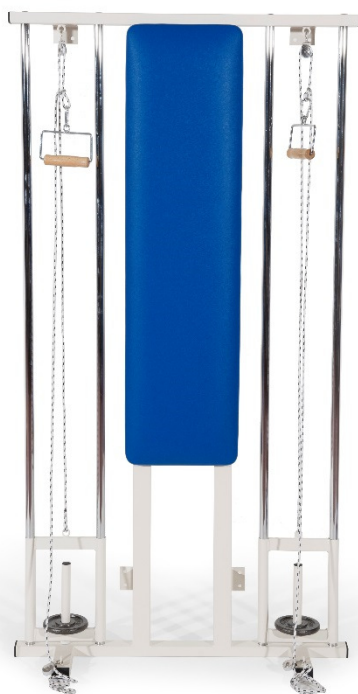

MODELLI ERCOLINA DOPPIA

| Descrizione | Codice |
|-----------------|--------|
| Ercolina doppia | 135020 |

FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale: Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@mailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

Indice

| | |
|--|---------------|
| INTRODUZIONE | pag. 3 |
| SICUREZZA – GARANZIA – DISIMBALLO – SMALTIMENTO | pag. 4 |
| CARATTERISTICHE TECNICHE – IN DOTAZIONE | pag. 5 |
| INSTALLAZIONE – MODALITÀ D’USO | pag. 6 |
| AVVERTENZE – MANUTENZIONI – PULIZIA | pag. 7 |
| ACCESSORI | pag. 8 |
| REGISTRAZIONE INTERVENTI | pag. 9 |

INTRODUZIONE

Questo manuale ha lo scopo di fornire agli utilizzatori ed addetti le informazioni necessarie affinché, oltre ad un adeguato utilizzo delle parallele, siano in grado di gestirle in autonomia e sicurezza.

Il manuale contiene informazioni inerenti all'aspetto tecnico, al funzionamento, alla manutenzione, ai ricambi ed alla sicurezza.

Il Libretto Istruzioni deve sempre seguire l'apparecchiatura e deve essere accuratamente conservato al fine di non comprometterne lo stato di leggibilità.

In caso di cessione a terzi è necessario trasmettere il presente manuale insieme agli altri documenti così come previsto dalle disposizioni inerenti alla Direttiva Europea 93/42/CEE.

Uso previsto

L'ercolina doppia permette di eseguire esercizi di rinforzo muscolare e riabilitazione arti superiori ed inferiori.

Dati del costruttore

FISIOTECH SRL

Sede Operativa: Via Toniolo, 44/E-F

31028 VAZZOLA (TV) - Italia

Tel. +39 0438 470342

Fax +39 0438 478762

info@fisiotech.com

Immagazzinaggio

In caso di immagazzinamento si devono rispettare le seguenti condizioni ambientali: umidità relativa 10% ÷ 90 % - temperatura -10°C ÷ +50°C. Luogo pulito.



ATTENZIONE! Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il lettino.

FISIOTECH SRL declina ogni responsabilità e non risponde per danni a persone e/o cose causate da uso non conforme dell'ercolina o fatto da personale negligente o non qualificato o dalla mancata osservanza di tali istruzioni.

SICUREZZA



ATTENZIONE! L'ercolina doppia non deve essere utilizzata:

- Con carichi superiori a quanto stabilito dal costruttore.
- Con carichi non collocati e ripartiti secondo quanto stabilito nel Manuale.
- Con carichi dinamici (In movimento).
- Senza aver effettuato il corretto assemblaggio, ancoraggio e collaudo.
- Con manomissioni e/o modifiche sul prodotto originale.
- In configurazione impropria o quando ci sia il sospetto che possa arrecare danno al paziente.
- Da bambini e minori non sorvegliati.
- In ambiente esposto alle intemperie.



ATTENZIONE!

L'installazione deve essere effettuata da un tecnico competente che abbia consultato il presente manuale, oltre ad aver accertato l'idoneità del locale.

Valutare i possibili pericoli derivanti dall'associazione di altre apparecchiature alla struttura (Esempio: pesi aggiuntivi, connessioni elettriche, lettino per terapia regolabile in altezza con traslazione laterale, ecc.)

GARANZIA

L'ercolina doppia gode di una garanzia che copre solamente i difetti di fabbricazione per 24 mesi dalla data di consegna. La garanzia non copre: i materiali di consumo e quelli di normale usura quali: corda/fine, maniglia i guasti causati da urti e/o cadute, l'errato o improprio uso, l'uso da parte di personale non qualificato. Qualora l'apparecchiatura risulti manomessa la garanzia decade automaticamente. Le riparazioni in garanzia si intendono presso nostra sede operativa e previa autorizzazione. Il materiale da riparare in garanzia ci dovrà pervenire in porto franco e con imballo originale. Per la riparazione oltre alla richiesta scritta ci dovrà pervenire copia della fattura e del documento di trasporto.

DISIMBALLO

Dopo aver depositato in luogo idoneo tutto il contenuto dell'imballo si potrà procedere con l'installazione.



ATTENZIONE! Fare molta attenzione per evitare tagli alle mani per uso incauto di cutters o forbici o altri attrezzi usati per il taglio. Si consiglia di utilizzare forbici con punte arrotondate per evitare danni alle mani e all'attrezzatura. Conservare l'imballo per un'eventuale restituzione al costruttore. Smaltire reggette, pluriball e cartone come materiale di riciclaggio.

SMALTIMENTO



La presenza di questo simbolo su un prodotto indica che esso non deve essere gettato tra i rifiuti generici ma raccolto a parte per operazioni di riciclaggio o smaltimento a norma di legge.



ATTENZIONE! Il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata." Significa che non deve essere gettato tra i rifiuti generici ma va quindi raccolto per operazioni di riciclaggio o smaltimento a norma di legge portandolo o depositandolo presso i centri di raccolta differenziata predisposti dalle varie amministrazioni locali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|-----------------|--------|
| Codice articolo | 135020 |
|-----------------|--------|

Struttura in acciaio verniciato a due stazioni a doppio rinvio a corda.
Completa di piano imbottito e rivestito in similpelle lavabile ed ignifugo.
Carico di lavoro regolabile con pesi da 1 kg. per un peso massimo di 8 kg.

| | |
|------------|--------|
| Altezza | 185 cm |
| Larghezza | 102 cm |
| Profondità | 28 cm |



ATTENZIONE! Prima di procedere al montaggio e installazione assicurarsi:

- dell'idoneità strutturale
- dell'idoneità dell'ambiente
- dell'adeguatezza dello spazio a disposizione.

Per l'installazione dell'ercolina è necessario avere idonea competenza tecnica ed è necessario essere in almeno due persone.

MATERIALE IN DOTAZIONE

- No. 8 mt di funicella in nylon 5 mm
- No. 2 moschettone
- No. 4 carrucola in ferro
- No. 2 maniglia a presa anatomica

INSTALLAZIONE

Appoggiare l'ercolina alla parete, segnare i fori con una matita, quindi forare con trapano con punta adeguata in base ai tasselli ad espansione scelti precedentemente, (in base al tipo di muratura). Inserire i tasselli e chiudere bene il tutto.

MODALITÀ D'USO

1. Inserire i pesi desiderati in base al tipo di esercizio scelto, nell'apposito carrello porta pesi (posizione A).
2. Per gli esercizi eseguiti dall'alto verso il basso, le maniglie vanno inserite nell'attacco (posizione B). Per gli esercizi eseguiti dal basso verso l'alto e con cavigliere, le maniglie vanno inserite nell'attacco (posizione C).



ATTENZIONE!

- IL COSTRUTTORE NON PUO' RISPONDERE DELL'INSTALLAZIONE ESEGUITA FUORI CONTROLLO.
- LE STRUTTURE SONO STATE PROGETTATE, COLLAUDATE E COSTRUITE PER SOPPORTARE IN SICUREZZA I CARICHI DELLE PORTATE DICHIARATE.

AVVERTENZE



ATTENZIONE! L'operatore non deve mai lasciare il paziente incustodito. Il costruttore non risponde per danni a persone e/o cose causate dall'uso del dispositivo da parte di personale negligente e/o non qualificato.

MANUTENZIONI

Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti da tecnici specializzati, elettricisti o persone con conoscenza del contenuto del presente libretto istruzioni.

Verificare le condizioni di sicurezza dell'apparecchio dopo ogni situazione critica come ad esempio caduta, urti violenti, versamento di liquidi, ecc. ed ogni qualvolta si abbiano dei dubbi sullo stato di sicurezza dell'apparecchio.



ATTENZIONE!

- In evidenza di pericolo per la sicurezza, il dispositivo deve essere immediatamente disattivato senza possibilità di utilizzo finché il pericolo non sia stato eliminato.

| MANUTENZIONI | COME FARE |
|---|--|
| L'ercolina non ha bisogno di particolari manutenzioni, ma si raccomanda di: | Oliare periodicamente le guide cromate con olio di vasellina spray. Controllare le funi e sostituirle periodicamente o quando sono usurate. |

PULIZIA

PULIZIA: spolverare con un panno non abrasivo asciutto o al massimo appena inumidito con po' di acqua e asciugare con cura.

Pulizia dell'imbottitura: Spolverare delicatamente e in caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido o con una soluzione di detergente neutro, risciacquando con acqua, senza strizzare. Lasciare asciugare evitando l'esposizione diretta alla luce del sole.

OPTIONAL SU RICHIESTA

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---------------|------------------------------------|
| 136052 | Cavigliera con gancio. Colore nero |
| 137105 | Cavigliera |
| 136041 | Dischi in ghisa |

