

# MANUALE ISTRUZIONI

## ATLAS



### MODELLI ATLAS

Descrizione	Codice
Atlas Rosso	1414161
Atlas Verde acqua	1414162

#### FISIOTECH SRL

**Sede Operativa e Amministrativa:** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Sede legale :** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : [info@fisiotech.com](mailto:info@fisiotech.com) - pec : [fisiotech@mailsec.it](mailto:fisiotech@mailsec.it)

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

# Indice

<b>INTRODUZIONE</b>	<b>pag. 3</b>
<b>AVVERTENZE - PULIZIA – DISINFEZIONE – STOCCAGGIO</b>	<b>pag. 4</b>
<b>IMPIEGO IN BAGNI TERMALI – IN PISCINA - DESCRIZIONE</b>	<b>pag. 5</b>
<b>MODELLI</b>	<b>pag. 6</b>

## INTRODUZIONE

La ringraziamo per avere scelto la qualità di un prodotto AIREX® qui di seguito potrà trovare le istruzioni per un uso corretto ed una adeguata manutenzione che permetterà al vostro prodotto di durare più lungo. Questo prodotto AIREX® è stato realizzato secondo le normative CE.

### **Dati del produttore**

AIREX AG Speciality Foams  
Industrie Nord, 26  
5643 Sins, Schweiz  
Tel. +41 41 789 66 00  
Fax +41 41 789 66 60

### **Dati del distributore**

FISIOTECH SRL  
Sede Operativa: Via Toniolo, 44/E-F  
31028 VAZZOLA (TV) - Italia  
Tel. +39 0438 470342  
Fax +39 0438 478762  
[info@fisiotech.com](mailto:info@fisiotech.com)

### **Uso previsto**

L'uso consigliato per il materassino atlas di AIREX® è per: fitness, fisioterapia e riabilitazione e per sessioni di gruppo.



**ATTENZIONE! Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il dispositivo.**

**FISIOTECH SRL declina ogni responsabilità e non risponde per danni a persone e/o cose causate da uso non conforme del dispositivo o fatto da personale negligente o non qualificato o dalla mancata osservanza di tali istruzioni.**

## AVVERTENZE

**ATTENZIONE:** in conseguenza al particolare processo di fabbricazione, le misure del materassino potrebbero essere leggermente diverse da quelle qui indicate, la maggior differenza si potrebbe riscontrare nella lunghezza.

## PULIZIA

Per pulire i materassini da ginnastica AIREX® utilizzare una spazzola morbida e acqua tiepida con sapone o una soluzione di detergente domestico (detersivo per i piatti). E' possibile anche il lavaggio in lavatrice, che tuttavia è consigliato per motivi pratici. Qualora il lavaggio in lavatrice sia assolutamente necessario, si raccomanda di utilizzare un programma delicato con una temperatura massima di 40°C. E' ammesso l'uso dei detersivi in polvere disponibili in commercio. Per pulire i materassini è assolutamente vietato utilizzare benzina o gli smacchiatori reperibili in commercio.

## DISINFEZIONE

La disinfezione dei materassini da ginnastica AIREX® non è necessaria grazie alle loro proprietà fungicide e battericide. Se la disinfezione è comunque necessaria per motivi igienici particolari, è possibile utilizzare disinfettanti e detersivi per uso domestico, ospedaliero e per istituti (Merfen, Descogen, Kohrsolin, Kohrsolin FF, Terralin), in soluzione acquosa. Non è ammessa la sterilizzazione con vapore ad alta temperatura.

## STOCCAGGIO / CONSERVAZIONE

I materassini possono essere conservati singolarmente arrotolati, fissati con l'apposita cinghia (su richiesta). Una soluzione ideale per raggruppare più materassini è la sistemazione in apposito supporto verticale o in orizzontale. Se i materassini non devono essere utilizzati per lungo tempo, occorre preferibilmente conservarli impilati in un ambiente secco e non riscaldato.

## IMPIEGO IN BAGNI TERMALI E SAUNE

Per garantire la lunga durata dei materassini AIREX® in caso d'impiego in ambienti caldi ed estremamente umidi, come bagni pubblici e privati, bagni termali e simili, è necessario lavarli a fondo ad intervalli regolari e lasciarli asciugare all'aria.

## IMPIEGO IN PISCINA

I materassini AIREX® sono resistenti alle sostanze chimiche per la depurazione dell'acqua e per la sterilizzazione (cloro, ipoclorito, ozono, ecc.). Si consiglia (anche per motivi igienici) di lavare i materassini con acqua fresca dopo l'uso, e di lasciarli asciugare all'aria. In linea di principio i materassini sono resistenti agli oli e grassi vegetali. Determinati oli solari ed emulsioni possono tuttavia modificare leggermente la superficie dei materassini, abbreviandone la durata. In questi casi si consiglia di coprire il materassino ad es. con un telo da bagno.

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Airex AG è leader mondiale nella produzione di tappetini da ginnastica con il marchio AIREX®. I materiali testati e la qualità svizzera dimostrata nel processo di fabbricazione garantiscono la durata del prodotto anche in condizioni difficili. I prodotti AIREX® soddisfano e superano le normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni.


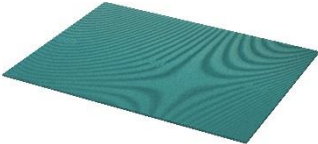
### **Perchè scegliere i prodotti professionali AIREX®:**

- Comfort al tatto
- Semplice da pulire, finitura antimicrobica
- Materiali resistenti per molti anni di utilizzo
- Eccellente capacità ammortizzante e grande stabilità negli esercizi di equilibrio
- Leggerezza e flessibilità, sono facili da arrotolare e da riporre
- Impermeabile: struttura a cellule chiuse. Nessuna penetrazione di acqua o sporco

### **Tre suggerimenti per i prodotti AIREX®**

1. Utilizzare i prodotti a piedi nudi o con le calze (senza scarpe)
2. Pulire i prodotti con acqua e sapone. La disinfezione non sarà necessaria grazie alla protezione integrata Sanitized!
3. Lasciare asciugare i prodotti AIREX® se si bagnano (possono essere utilizzati anche all'aperto)

## MODELLI

CODICE	DIMENSIONI E COLORE	
1414161	<p><b>Atlas</b> Colore Rosso.</p> <p>Dimensioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lunghezza 200 cm</li> <li>• Larghezza 125 cm</li> <li>• Altezza 1,5 cm</li> <li>• Peso 5,5 Kg.</li> </ul>	
1414162	<p><b>Atlas</b> Colore Verde acqua.</p> <p>Dimensioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lunghezza 200 cm</li> <li>• Larghezza 125 cm</li> <li>• Altezza 1,5 cm</li> <li>• Peso 5,5 Kg.</li> </ul>	

**ATTENZIONE:** in conseguenza al particolare processo di fabbricazione, le misure del materassino potrebbero essere leggermente diverse da quelle qui indicate, la maggior differenza si potrebbe riscontrare nella lunghezza.