

# MANUALE D'USO E DI MANUTEZIONE

## REFLEXBALL



### MODELLI – DIMENSIONI DATI TECNICI

Diametro	Confezione	Colore	Codice
8 cm	2 pezzi	Verde	1411111
9 cm	2 pezzi	Blu	1411112
10 cm	2 pezzi	Verde	1411113

#### FISIOTECH SRL

**Sede Operativa e Amministrativa:** Via Toniolo, 44/E-F-G - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Sede legale :** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : [info@fisiotech.com](mailto:info@fisiotech.com) - pec : [fisiotech@mailsec.it](mailto:fisiotech@mailsec.it)

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

# Indice

<b>INTRODUZIONE</b>	<b>pag. 3</b>
<b>MODELLI – SICUREZZA – GARANZIA</b>	<b>pag. 4</b>
<b>AVVERTENZE – PULIZIA – ESERCIZI</b>	<b>pag. 5</b>

## INTRODUZIONE

Questo manuale ha lo scopo di fornire agli utilizzatori ed addetti le informazioni necessarie affinché, oltre ad un adeguato utilizzo delle parallele, siano in grado di gestirle in autonomia e sicurezza.

Il manuale contiene informazioni inerenti all'aspetto tecnico, al funzionamento, alla manutenzione, ai ricambi ed alla sicurezza.

Il Libretto Istruzioni deve sempre seguire l'apparecchiatura e deve essere accuratamente conservato al fine di non comprometterne lo stato di leggibilità.

In caso di cessione a terzi è necessario trasmettere il presente manuale insieme agli altri documenti così come previsto dalle disposizioni inerenti al Regolamento UE 2017/745.

### Uso previsto

Questo dispositivo si rivela uno specifico supporto per il massaggio, la riflessologia, la terapia delle mani e gli esercizi di rilassamento.

### Dati del distributore

Ledraplastic Spa

### Dati del distributore

FISIOTECH SRL

Sede Operativa: Via Toniolo, 44/E-F-G

31028 VAZZOLA (TV) - Italia

Tel. +39 0438 470342

Fax +39 0438 478762

[info@fisiotech.com](mailto:info@fisiotech.com)



**ATTENZIONE! Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il lettino.**

**FISIOTECH SRL declina ogni responsabilità e non risponde per danni a persone e/o cose causate da uso non conforme del dispositivo o fatto da personale negligente o non qualificato o dalla mancata osservanza di tali istruzioni.**

## MODELLI

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
1411111	Ø 8 cm Colore Verde
1411112	Ø 9 cm Colore Blu
1411113	Ø 10 cm Colore Verde

## SICUREZZA



### ATTENZIONE:

- **Pericolo di soffocamento. Dispositivo non adatto ai bambini di età inferiore ai 36 mesi. Contiene piccole parti che potrebbero essere ingerite.**
- **Da utilizzare solo per esercizi con il peso del corpo. Non adatto per esercizi con il bilanciere e ogni tipo di peso. Sollevare pesi durante l'uso può causare danni all'utilizzatore.**
- **Se utilizzato da bambini si raccomanda la supervisione di un adulto.**
- **In caso di foratura non riparare. Il prodotto riparato perde i requisiti di sicurezza.**
- **Non esporre il prodotto a fonti di calore o lungamente alla luce diretta; ciò comporta l'alterazione delle sue caratteristiche fisiche e cromatiche.**

## GARANZIA

Le Reflex ball godono di una garanzia che copre solamente i difetti di fabbricazione per 12 mesi dalla data di consegna. La garanzia non copre: l'errato o improprio uso, l'uso da parte di personale non qualificato. Qualora il dispositivo risulti manomesso la garanzia decade automaticamente. Le riparazioni in garanzia si intendono presso nostra sede operativa e previa autorizzazione. Il materiale da riparare in garanzia ci dovrà pervenire in porto franco e con imballo originale. Per la riparazione oltre alla richiesta scritta ci dovrà pervenire copia della fattura e del documento di trasporto.

## AVVERTENZE



**Prima di ogni utilizzo verificare:**

- l'integrità del prodotto;
- utilizzarlo lontano da fonti di calore e su superfici prive di oggetti acuminati (attenzione a zip, anelli, orologi, ecc.).

## PULIZIA

Pulire con acqua e sapone delicato.  
Non usare spazzole, spugne abrasive o sostanze chimiche.  
Non usare sistemi di sterilizzazione.

## ESERCIZI

