


MANUALE D'USO E DI MANUTENZIONE

RUOTE DEI LAPIDARI

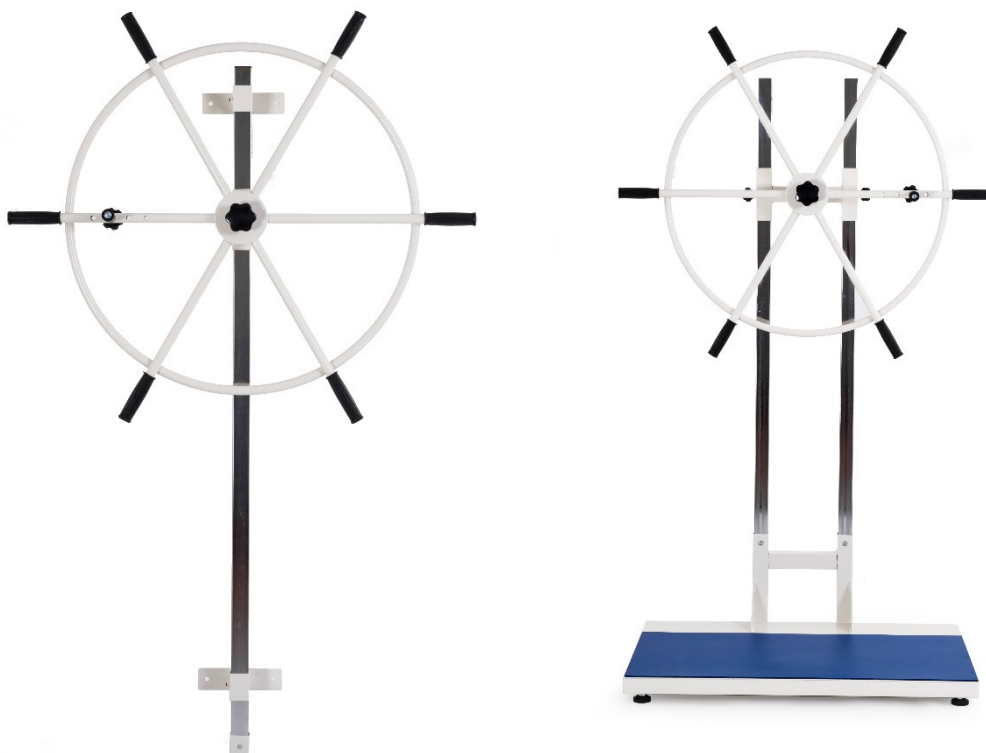

MODELLI RUOTA DEI LAPIDARI

Descrizione	Codice
Ruota a parete	135040
Ruota a pavimento	135050

FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale: Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@mailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

Indice

INTRODUZIONE	pag. 3
SICUREZZA – GARANZIA – SMALTIMENTO	pag. 4
CARATTERISTICHE TECNICHE – MODELLI	pag. 5
ISTRUZIONI PER ILMONTAGGIO – MODALITÀ D’USO	pag. 6
AVVERTENZE	pag. 7
MANUTENZIONI – PULIZIA	pag. 8
REGISTRAZIONE INTERVENTI	pag. 9

INTRODUZIONE

Questo manuale ha lo scopo di fornire agli utilizzatori ed addetti le informazioni necessarie affinché, oltre ad un adeguato utilizzo delle ruote dei lapidari, siano in grado di gestirle in autonomia e sicurezza.

Il manuale contiene informazioni inerenti all'aspetto tecnico, al funzionamento, alla manutenzione, ai ricambi ed alla sicurezza.

Il Libretto Istruzioni deve sempre seguire l'apparecchiatura e deve essere accuratamente conservato al fine di non comprometterne lo stato di leggibilità.

In caso di cessione a terzi è necessario trasmettere il presente manuale insieme agli altri documenti così come previsto dalle disposizioni inerenti alla Direttiva Europea 93/42/CEE.

Uso previsto

Dispositivo per la riabilitazione della spalla e del gomito. Struttura in acciaio verniciato con parte scorrevole cromata. Ruota regolabile in altezza. Frizione per regolare lo sforzo. L'utilizzo della Ruota dei Lapidari consente al terapeuta di far svolgere un'attività ripetitiva in piena sicurezza all'utilizzatore.

Dati del costruttore:

FISIOTECH SRL

Sede Operativa: Via Toniolo, 44/E-F

31028 VAZZOLA (TV) - Italia

Tel. +39 0438 470342

Fax +39 0438 478762

info@fisiotech.com

Immagazzinaggio

L'apparecchiatura non richiede particolari condizioni ambientali. Deve essere utilizzata all'interno di un edificio con temperatura ammesse da 5° a 40°C e con umidità compresa tra 10% e 80%.



ATTENZIONE! Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il lettino.

FISIOTECH SRL declina ogni responsabilità e non risponde per danni a persone e/o cose causate da uso non conforme delle ruote dei lapidari o eseguito da personale negligente o non qualificato o dalla mancata osservanza di tali istruzioni.

SICUREZZA



ATTENZIONE!

- E' vietato l'utilizzo del seguente dispositivo per fini diversi da quanto definito nel seguente manuale.
- E' vietato l'utilizzo del seguente dispositivo esposto alle intemperie.
- E' vietato l'utilizzo del seguente dispositivo senza aver effettuato idonea installazione a muro (per la ruota dei lapidari a parete).
- E' vietato versare liquidi sul dispositivo.
- L'utilizzatore deve essere assistito dal terapista durante l'utilizzo.
- Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche.



ATTENZIONE!

- Per un utilizzo corretto del dispositivo fare riferimento attentamente al seguente manuale
- Mantenere il prodotto imballato lontano da qualsiasi fonte di calore in quanto l'imballo è fatto di cartone.
- La vita utile del dispositivo è determinata dall'usura di parti non riparabili e/o sostituibili.
- Prestare sempre molta attenzione alla presenza di parti in movimento che potrebbero causare intrappolamenti agli arti e lesioni personali.
- Prestare sempre attenzione alla presenza di bambini.
- Consultare sempre il Vostro medico o terapista prima di eseguire qualsiasi terapia riabilitativa.

GARANZIA

Le ruote dei lapidari godono di una garanzia che copre solamente i difetti di fabbricazione per 24 mesi dalla data di consegna. La garanzia non copre: i materiali di consumo e quelli di normale usura quali: imbottiti, i guasti causati da urti e/o cadute, l'errato o improprio uso, l'uso da parte di personale non qualificato. Qualora l'apparecchiatura risulti manomessa la garanzia decade automaticamente. Le riparazioni in garanzia si intendono presso nostra sede operativa e previa autorizzazione. Il materiale da riparare in garanzia ci dovrà pervenire in porto franco e con imballo originale. Per la riparazione oltre alla richiesta scritta ci dovrà pervenire copia della fattura e del documento di trasporto.

SMALTIMENTO



La presenza di questo simbolo su un prodotto indica che esso non deve essere gettato tra i rifiuti generici ma raccolto a parte per operazioni di riciclaggio o smaltimento a norma di legge.



ATTENZIONE! Il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata." Significa che non deve essere gettato tra i rifiuti generici ma va quindi raccolto per operazioni di riciclaggio o smaltimento a norma di legge portandolo o depositandolo presso i centri di raccolta differenziata predisposti dalle varie amministrazioni locali.

CARATTERISTICHE TECNICHE - MODELLI

Ruota dei lapidari a parete

Regolazione della ruota in altezza

Regolazione dello sforzo

Altezza

Larghezza

Profondità

Impugnature in gomma per una presa sicura

135040

manuale

manuale

160 cm

110 cm

30 cm

6



Ruota dei lapidari a pavimento	135050
Regolazione della ruota in altezza	manuale
Regolazione dello sforzo	manuale
Altezza	160 cm
Larghezza	110 cm
Profondità	66 cm
Dimensione base	90x60 cm
Impugnature in gomma per una presa sicura	6




ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO RUOTA DEI LAPIDARI A PARETE

- Togliere l'imballo.
- Togliere una staffa per poter inserire la ruota nell'apposita asta cromata e reinserire la staffa.
- Appoggiare la ruota dei lapidari alla parete.
- Posizionare le staffe di fissaggio alle due estremità dell'asta cromata e serrare i grani.
- Segnare i 4 fori di fissaggio (due per ogni staffa), forare con la punta del trapano adatta ai tasselli ad espansione scelti in precedenza.
- I tasselli completi di viti non sono in dotazione e devono essere adeguati al tipo di muratura.
- Fissare alla parete la ruota dei lapidari serrando le viti.

MODALITÀ D'USO

- Posizionare la ruota all'altezza delle braccia agendo sul volantino "A" posizionato sul retro della ruota.
- Regolare lo sforzo agendo sul volantino "B".
- L'esercizio si può eseguire utilizzando tutte due le braccia oppure con solo un braccio.
- L'esercizio attivo può iniziare come libero e poi si può procedere applicando una progressiva resistenza tramite frizione. Per iniziare l'esercizio afferrare le manopole "D" poste su tutte le estremità della ruota (con un solo braccio o con tutti e due) e iniziare a far girare la ruota.
- L'esercizio può avvenire da seduto oppure in posizione eretta.
- Il volantino "E" può essere posizionato in modo da aumentare o diminuire il raggio dell'esercizio.

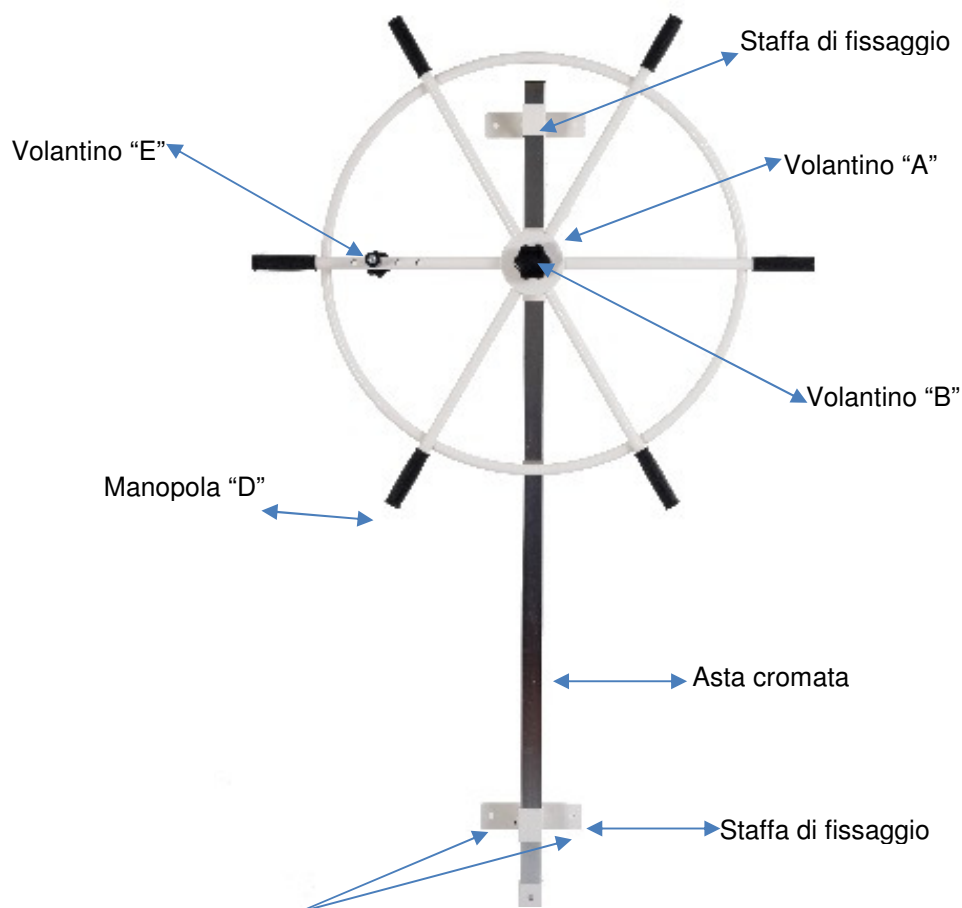

AVVERTENZE PER L'USO

PRIMA DI OGNI USO

- Verificare sempre lo stato di usura delle parti meccaniche in gioco in modo tale da garantire un utilizzo del dispositivo in totale sicurezza per persone e cose.
- Verificare il corretto assemblaggio del dispositivo.
- Verificare sempre il corretto funzionamento della frizione per la regolazione dell'intensità di sforzo.



ATTENZIONE!

- Assicurarsi che la ruota sia fissata correttamente al muro.

AVVERTENZE



ATTENZIONE! L'operatore non deve mai lasciare il paziente incustodito per impedire il rischio di caduta del paziente. FISIOTECH non risponde per danni a persone e/o cose causate dall'uso del dispositivo da parte di personale negligente e/o non qualificato.

MANUTENZIONI

Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti da tecnici specializzati, o persone con conoscenza del contenuto del presente libretto istruzioni.

Verificare le condizioni di sicurezza dell'apparecchio dopo ogni situazione critica come ad esempio caduta, urti violenti, versamento di liquidi, ecc. ed ogni qualvolta si abbiano dei dubbi sullo stato di sicurezza dell'apparecchio.



ATTENZIONE!

- In evidenza di pericolo per la sicurezza, il dispositivo deve essere immediatamente disattivato senza possibilità di utilizzo finché il pericolo non sia stato eliminato.

MANUTENZIONI	COME FARE
<p>La ruota dei lapidari non ha bisogno di particolari manutenzioni, ma si raccomanda di:</p>	<p>Controllare ogni 3 mesi circa, o dopo un uso particolarmente intenso, il serraggio di viti, verifica giochi dei volantini e; assenza di lesioni e deformazioni strutturali.</p> <p>Nel caso la resistenza dello sforzo non sia più idonea, contattare la ditta venditrice.</p>

PULIZIA

- Si consiglia di disinfettare periodicamente le manopole e volantini con un comune detergente disinfettante.
- Per la pulizia utilizzare esclusivamente un panno non abrasivo asciutto o al massimo appena inumidito con acqua e sapone neutro. Successivamente asciugare bene prima dell'utilizzo.
- Non utilizzare macchine di lavaggio a getto di acqua e/o vapore.

N.B. EVITARE ASSOLUTAMENTE DI UTILIZZARE PRODOTTI ACIDI, ALCALINI O SOLVENTI COME AD ESEMPIO L'ACETONE O IL DILUENTE

REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI			
MODELLO / CODICE DISPOSITIVO: 		DATA INSTALLAZIONE 	MATRICOLA No.
Data intervento	Operazioni eseguite	Nome persona incaricata	Firma