

MANUALE D'USO E DI MANUTENZIONE

ROLLATOR



MODELLI ROLLATOR

Descrizione	Codice
Rollator	1712150

FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale: Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisitech.com - pec : fisitech@wmailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

Indice

INTRODUZIONE	pag. 3
SICUREZZA – GARANZIA – DATI TECNICI	pag. 4
ISTRUZIONI PER L'USO	pag. 5
TRASPORTO/IMMAGAZZINAGGIO/SMALTIMENTO MANUTENZIONE – PULIZIA	pag. 6

INTRODUZIONE

Questo manuale ha lo scopo di fornire agli utilizzatori ed addetti le informazioni necessarie affinché, oltre ad un adeguato utilizzo del negatoscopio, siano in grado di gestire lo stesso in autonomia e sicurezza.

Il manuale contiene informazioni inerenti all'aspetto tecnico, al funzionamento, alla manutenzione, ai ricambi ed alla sicurezza.

Il Libretto Istruzioni deve sempre seguire l'apparecchiatura e deve essere accuratamente conservato al fine di non comprometterne lo stato di leggibilità.

In caso di cessione a terzi è necessario trasmettere il presente manuale insieme agli altri documenti così come previsto dalle disposizioni inerenti ai dispositivi medici.

Dati del costruttore

PIAI ORTOTECH SRL

Via A. Meucci, 32

31029 VITTORIO VENETO (TV)

P.I. 04193400266

Tel. 0438/500884

Dati del distributore

FISIOTECH SRL

Sede Operativa: Via Toniolo, 44/E-F

31028 VAZZOLA (TV) - Italia

Tel. +39 0438 470342

Fax +39 0438 478762

info@fisitech.com



ATTENZIONE! Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il rollator.

FISIOTECH SRL declina ogni responsabilità e non risponde per danni a persone e/o cose causate da uso non conforme del dispositivo o fatto da personale negligente o non qualificato o dalla mancata osservanza di tali istruzioni.

SICUREZZA



ISTRUZIONI/AVVERTENZE RISCHI GENERICI

- La scelta del Dispositivo spetta all'utilizzatore coadiuvato da personale medico-ortopedico.
- Le indicazioni contenute in questo manuale devono essere rispettate per evitare danni a cose o persone.
- La ditta si riserva di modificare i dati e le dotazioni aggiuntive riportati in questo manuale.
- Fare attenzione alla esposizione al sole, le superfici potrebbero raggiungere temperature dannose.
- Utilizzare solo su superfici in piano, stabili e lisce.
- Non utilizzare su gradini, scale o scale mobili.
- Prestare attenzione alla presenza di tappeti, fili elettrici od altri ingombri a pavimento.
- Nel caso di trasferimento dal deambulatore ad una carrozzina, bloccare i freni di entrambi i dispositivi.
- Non utilizzare il prodotto con carichi superiori alla portata max.
- Non spingere il deambulatore distante dal corpo, potrebbe sfuggire.
- Non utilizzare il deambulatore con sedile come fosse una carrozzina.
- Prima di sedersi frenare il deambulatore e non accedere dal lato cestino

GARANZIA

I deambulatori in lega leggera godono di una garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto e copre solamente qualsiasi difetto relativo a progettazione, materiali, fabbricazione ed assemblaggio, escludendo da ogni garanzia i danni causati da usura, manomissione od uso improprio.

Il prodotto da riparare in garanzia ci dovrà pervenire in porto franco e con imballo originale. Per la riparazione oltre alla richiesta scritta ci dovrà pervenire copia della fattura e del documento di trasporto.

La garanzia decade in mancanza di comprovante data di acquisto, tentativi di riparazione non autorizzati, danni causati da eventi accidentali, non osservanza delle istruzioni od avvertenze riportate nel manuale d'uso.

DATI TECNICI

Deambulatore rollator in acciaio verniciato, pieghevole, ruote 200x50 post unidirezionali ed anteriori piroettanti. Manubrio regolabile in altezza con freni a leva. Sedile, cestello, vassoio appoggio rimovibile, portabastone. ISO DM 332/1999: 12.06.09.009 -12.06.09.106 -12.06.09.130-12.06.09.142.

Regolazione altezza	Da 80 a 98 cm
Lunghezza	70 cm
Larghezza	62 cm
Sedile imbottito in poliuretano	L43 x h 62 cm
Ruote anteriori piroettanti dimensioni	20X5 cm
Ruote posteriori unidirezionali dimensioni	20x5 cm
Peso	12 kg
Portata Max	150 kg



ISTRUZIONI PER L'USO SPECIFICHE – AVVERTENZE E RISCHI

modello a quattro ruote	Impugnare il deambulatore prestando attenzione ad avere preventivamente frenato le ruote, per evitare che il deambulatore sfugga. Verificare che preventivamente alla impugnatura le ruote siano bloccate
Freni di rallentamento e stazionamento tramite leva.	Frenata di stazionamento spingendo la leva ad anello verso il basso, rallentamento tramite trazione verso l'alto, come su freni normali
regolazione indipendente altezza impugnature	Regolazione indipendente altezza ed inclinazione impugnature tramite azionamento morsetto. Posizionare alla stessa altezza salvo diversa prescrizione medico-ortopedica
Apertura e chiusura dispositivo su modelli base REF R77E	Agire sulla leva indicata sbloccando il meccanismo di sicurezza. Verificare di avere raggiunto fine corsa per garantire bloccaggio stabile. Attenzione agli intrappolamenti.
Appoggio antibrachiale	Posizionare ad altezza secondo prescrizione medico-ortopedica , agendo sulle regolazioni . Non eccedere nella altezza per evitare ribaltamenti.
Appoggio a stampella antibrachiale	Utilizzare solo dopo opportuno addestramento e su percorsi sicuri

TRASPORTO - IMMAGAZZINAGGIO - SMALTIMENTO

In caso di trasporto di terzi, verificare che sia correttamente protetto con imballo in cartone chiuso e robusto

Durante trasporti a propria cura o nel periodo di magazzinaggio verificare la pulizia di automezzi e locali, eventualmente proteggendo con telo antipolvere.

Il prodotto non contiene componenti classificabili come rifiuto speciale all'atto dello smaltimento. Verificare ed attenersi alle disposizioni locali riguardanti la raccolta differenziata.

MANUTENZIONI

- Verificare ogni 3 mesi lo stato delle ruote.
- Controllare ogni 3 mesi ed eventualmente registrare i freni di stazionamento.
- Controllare ogni 6 mesi il serraggio di viti e bulloni.
- Controllare ogni 6 mesi ed eventualmente lubrificare le parti in movimento.
- Sostituire immediatamente parti difettose.

PULIZIA

- Pulizia ordinaria va eseguita con acqua e detergente neutro.
- Pulizia straordinaria e sanificazione con getto di vapore a bassa pressione.
- Lavare ed asciugare subito in caso di contatto con sabbia ed acqua di mare.
- Per eventuali manutenzioni straordinarie rivolgersi alla ditta o al rivenditore autorizzato.