


# MANUALE ISTRUZIONI

## BALANCE BEAM

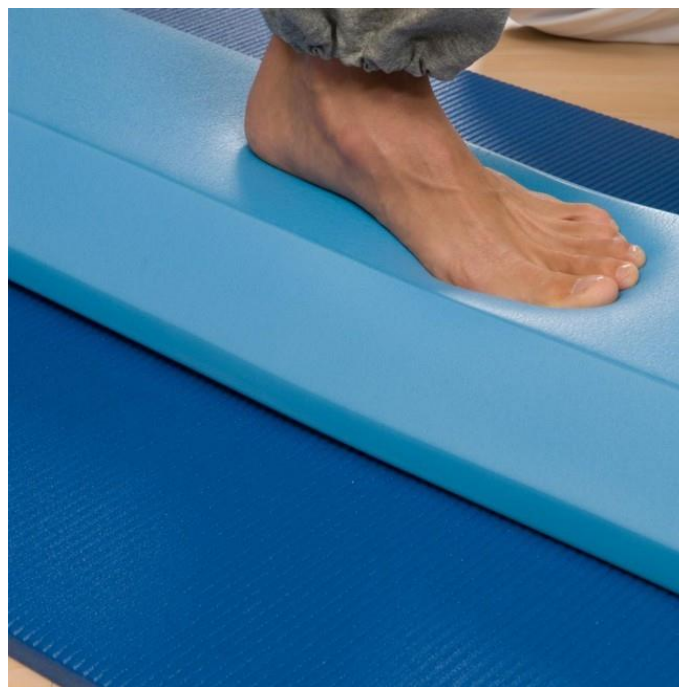

### MODELLI BALANCE BEAM

Descrizione	Codice
Balance Beam Blu	1414241

#### FISIOTECH SRL

**Sede Operativa e Amministrativa:** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Sede legale :** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : [info@fisiotech.com](mailto:info@fisiotech.com) - pec : [fisiotech@mailsec.it](mailto:fisiotech@mailsec.it)

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

# Indice

<b>INTRODUZIONE</b>	<b>pag. 3</b>
<b>AVVERTENZE – ASPETTO ESTERIORE CARATTERISTICHE – PULIZIA</b>	<b>pag. 4</b>
<b>STOCCAGGIO/CONSERVAZIONE – DESCRIZIONE PRODOTTO</b>	<b>pag. 5</b>
<b>MODELLI</b>	<b>pag. 6</b>

## INTRODUZIONE

La ringraziamo per avere scelto la qualità di un prodotto AIREX® qui di seguito potrà trovare le istruzioni per un uso corretto ed una adeguata manutenzione che permetterà al vostro prodotto di durare più lungo. Questo prodotto AIREX® è stato realizzato secondo le normative CE.

### **Dati del produttore**

AIREX AG Speciality Foams  
Industrie Nord, 26  
5643 Sins, Schweiz  
Tel. +41 41 789 66 00  
Fax +41 41 789 66 60

### **Dati del distributore**

FISIOTECH SRL  
Sede Operativa: Via Toniolo, 44/E-F  
31028 VAZZOLA (TV) - Italia  
Tel. +39 0438 470342  
Fax +39 0438 478762  
[info@fisiotech.com](mailto:info@fisiotech.com)

### **Uso previsto**

I prodotti Balance AIREX® sono ideali per esercizi di coordinazione o di equilibrio, fitness, pilates, yoga, fisioterapia e riabilitazione e per sessioni di gruppo.



**ATTENZIONE! Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il dispositivo.**

**FISIOTECH SRL declina ogni responsabilità e non risponde per danni a persone e/o cose causate da uso non conforme del dispositivo o fatto da personale negligente o non qualificato o dalla mancata osservanza di tali istruzioni.**

## AVVERTENZE

**ATTENZIONE:** in conseguenza al particolare processo di fabbricazione, le misure del materassino potrebbero essere leggermente diverse da quelle qui indicate, la maggior differenza si potrebbe riscontrare nella lunghezza.

**ATTENZIONE:** Prima di utilizzarli è necessario verificare che il pavimento non sia sdruciolevole; se lo fosse, utilizzare eventualmente un fondo antiscivolo (ad esempio un materassino AIREX®).

## ASPETTO ESTERIORE

Per quanto riguarda i prodotti super-morbidi, si mira innanzi tutto a garantire la funzionalità. Per ottenere un piacevole comfort, la morbidezza e l'effetto "molleggiato", è stato necessario adottare uno speciale processo di produzione.

Talvolta questi prodotti presentano leggere imperfezioni, come piccole bolle superficiali, leggeri scostamenti nelle dimensioni e lievi differenze nelle tonalità cromatiche. Tuttavia, tali imperfezioni occasionali non compromettono in alcun modo la funzionalità dei prodotti.

## CARATTERISTICHE

I prodotti in morbido espanso AIREX® a cellule chiuse non assorbono acqua e sono quindi caratterizzati da una portanza costante in acqua. Questi materiali estremamente robusti e resistenti perdono pressione (come i palloni) quando i corpi cellulari sono sottoposti a pressione per tempi prolungati. Per questo motivo si vengono a creare dei punti compressi che, in genere, riprendono lentamente il loro aspetto originale.

I prodotti in morbido espanso AIREX® sono forniti con un agente antibatterico, al fine di garantire una costante ed efficace protezione da batteri e funghi.

## PULIZIA

Qualsiasi tipo di sporco può essere rimosso preferibilmente con una spazzola morbida ed acqua tiepida con sapone. Le macchie ed altri segni non devono essere trattati con benzina, alcol o smacchiatori.

Se fosse necessaria la disinfezione, è consentito l'impiego di disinfettanti disponibili in commercio, come Merfen, Descogen o Chromium. Non è ammessa la sterilizzazione con vapore ad alta temperatura (in autoclave) o con acqua bollente.

## STOCCAGGIO / CONSERVAZIONE

Lo stoccaggio ottimale dei prodotti Balance AIREX® li vede disposti **orizzontalmente**. Per evitare compressioni, non lasciare appoggiati degli oggetti, per lungo tempo, su questi prodotti. Evitare di sottoporli a pressione continua per più di 12 ore. Se i prodotti vengono stoccati piegati (ad esempio appesi al filo della biancheria), possono venirsi a creare dei segni visibili permanenti causati dalla pressione. I prodotti durano meno nei casi di stoccaggio permanente in acqua o di lunghi periodi di esposizione alla luce diretta del sole, i cui effetti nel tempo determinano infragilimento e indurimento della superficie.

Per prolungare la durata dei prodotti, consigliamo di risciacquarli in acqua fresca dopo l'uso, avendo cura di eliminare l'acqua in eccesso e di lasciarli asciugare all'aria (mai su un radiatore, per evitare segni di compressione). Per motivi igienici i prodotti umidi non devono essere deposti in armadi o impilati.

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il Balance Beam di AIREX® è stato sviluppato appositamente per gli esercizi di equilibrio e ginnastica propriocettiva. Materassino trapezoidale ed è utilizzato principalmente in fisioterapia per riacquistare le funzioni del piede e della camminata. La muscolatura addominale e dorsale può essere rafforzata stando sdraiati.


Il materiale espanso ha le stesse caratteristiche destabilizzanti degli altri prodotti Balance. Grazie alla schiuma cedevole, il corpo viene costantemente sfidato per mantenere l'equilibrio e stabilizzare le articolazioni. Questo esercita muscoli più profondi rispetto all'esecuzione degli stessi esercizi senza il Balance Beam di AIREX®.

Come complemento, raccomandiamo un tappeto AIREX® da mettere sotto il Balance Beam di AIREX®, specialmente per gli esercizi che vengono eseguiti per es. sdraiato o nella posizione di sollevamento laterale.

### Tre suggerimenti per i prodotti AIREX®

1. Utilizzare i prodotti a piedi nudi o con le calze (senza scarpe)
2. Pulire i prodotti con acqua e sapone. La disinfezione non sarà necessaria grazie alla protezione integrata Sanitized!
3. Lasciare asciugare i prodotti AIREX® se si bagnano (possono essere utilizzati anche all'aperto)

## MODELLI

CODICE	DIMENSIONI E COLORE	
1414241	<b>BALANCE BEAM</b> Colore Blu. Dimensioni: <ul style="list-style-type: none"><li>• Lunghezza 160 cm</li><li>• Larghezza 24 cm</li><li>• Altezza 6 cm</li><li>• Peso 0,99 Kg.</li></ul>	

**ATTENZIONE:** in conseguenza al particolare processo di fabbricazione, le misure del materassino potrebbero essere leggermente diverse da quelle qui indicate, la maggior differenza si potrebbe riscontrare nella lunghezza.