

MANUALE ISTRUZIONI

DISCO'SIT



MODELLI DISCO'SIT

Descrizione	Codice
Disco'sit Blu	1417131

FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F-G - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@mailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

Indice

INTRODUZIONE	pag. 3
CARATTERISTICHE	pag. 4
GARANZIA – TRACCIABILITÀ – MODELLI – OPTIONAL	pag. 5
PULIZIA – AVVERTENZE	pag. 6
ESEMPI ESERCIZI	pag. 7

INTRODUZIONE

Questo manuale ha lo scopo di fornire agli utilizzatori ed addetti le informazioni necessarie affinché, oltre ad un adeguato utilizzo del Disco'sit, siano in grado di gestirlo in autonomia e sicurezza.

Il manuale contiene informazioni inerenti all'aspetto tecnico, al funzionamento, alla manutenzione, ai ricambi ed alla sicurezza.

Il Libretto Istruzioni deve sempre seguire l'apparecchiatura e deve essere accuratamente conservato al fine di non comprometterne lo stato di leggibilità.

In caso di cessione a terzi è necessario trasmettere il presente manuale insieme agli altri documenti così come previsto dalle disposizioni inerenti al Regolamento UE 2017/745.

Uso previsto

Disc'o'Sit cuscino da seduta per favorire la corretta postura, il Disc'o'Sit posizionato sulla sedia dona benessere alla colonna vertebrale grazie al movimento offerto.

Il Disc'o'Sit viene utilizzato anche nel settore dell'allenamento funzionale e può essere utilizzato per esercizi a terra per sviluppare coordinamento e migliorare riflessi e stabilità. Nella confezione è inclusa una brochure con alcuni esercizi esemplificativi.

Prodotto Medical Device di Classe I. Colore Blu.

Dati del fabbricante

Ledraplastic Spa

Dati del distributore

FISIOTECH SRL

Sede Operativa: Via Toniolo, 44/E-F-G

31028 VAZZOLA (TV) - Italia

Tel. +39 0438 470342

Fax +39 0438 478762

info@fisiotech.com



ATTENZIONE! Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il Disco'sit.

FISIOTECH SRL declina ogni responsabilità e non risponde per danni a persone e/o cose causate da uso non conforme del dispositivo o fatto da personale negligente o non qualificato o dalla mancata osservanza di tali istruzioni.

CARATTERISTICHE

- Il cuscino Disco'sit si adatta perfettamente alla scrivania per adulti e ad altre sedie.
- La materia prima utilizzata nel processo di produzione è PVC di alta qualità (vinile), che è conforme alla normativa REACH - CE 1907/2006.


HIGH QUALITY
PVC



- Senza ftalati e latex free



- I prodotti appartenenti alla categoria PVC 3 sono riciclabili al 100%.

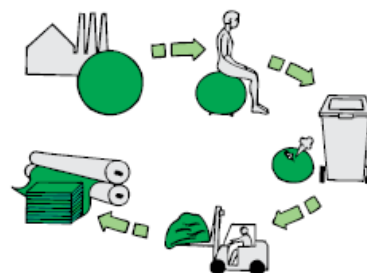

GARANZIA

Il Disco'sit è garantito per un periodo di 1 anno dalla data della prova d'acquisto.


La garanzia si intende solo per difetti di fabbricazione.

Il fabbricante non risponde di danni causati da un uso non corretto del prodotto.


Al fine di accogliere un reclamo, il prodotto in questione deve essere reso al fabbricante per l'ispezione.

NUMERO DI TRACCIABILITÀ


In ottemperanza alle normative europee riguardanti i Dispositivi Medici, il Movin' Sit è dotato di un numero di tracciabilità (lotto di produzione) composto da 4 cifre. Tale numero identificativo è apposto sul prodotto (o sulle istruzioni ad esso allegate) e sul master carton. In caso di reclamo si richiede di citare tale numero al fine di poter identificare il lotto di produzione.

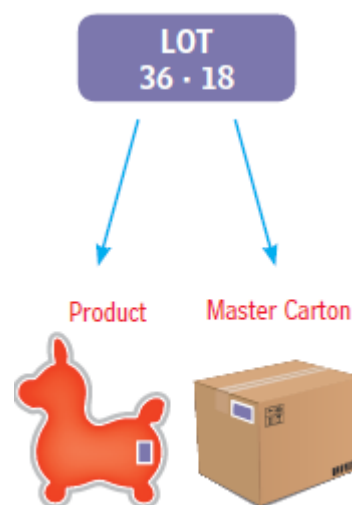

MODELLI – DIMENSIONI DATI TECNICI

CODICE	DIMENSIONI E COLORE	
1417131	Disco'sit Colore Blu. Dimensioni: <ul style="list-style-type: none"> • Ø 39 cm • Peso raccomandato 120 Kg • Capacità di carico testata 200 Kg 	

OPTIONAL

CODICE	DIMENSIONI E COLORE	
1417132	Foderina dotata di cerniera per rivestire il Disco'sit qualora lo si utilizzi come cuscino da seduta. Colore Blu.	

PULIZIA

Pulire con acqua e sapone delicato.
Asciugare con un panno asciutto per eliminare l'acqua in eccesso.
Non usare spazzole, spugne abrasive o sostanze chimiche.
Non usare sistemi di sterilizzazione.



ATTENZIONE

- Non esporre il prodotto a fonti di calore o lungamente alla luce diretta.
- Dispositivo adatto a bambini superiori ai 10 anni.
- Se utilizzato da bambini si raccomanda la supervisione di un adulto.
- In caso di foratura non riparare. Il prodotto riparato perde i requisiti di sicurezza.

ESEMPI ESERCIZI

