


MANUALE D'USO E DI MANUTENZIONE

PANNELLO PER ERGOTERAPIA

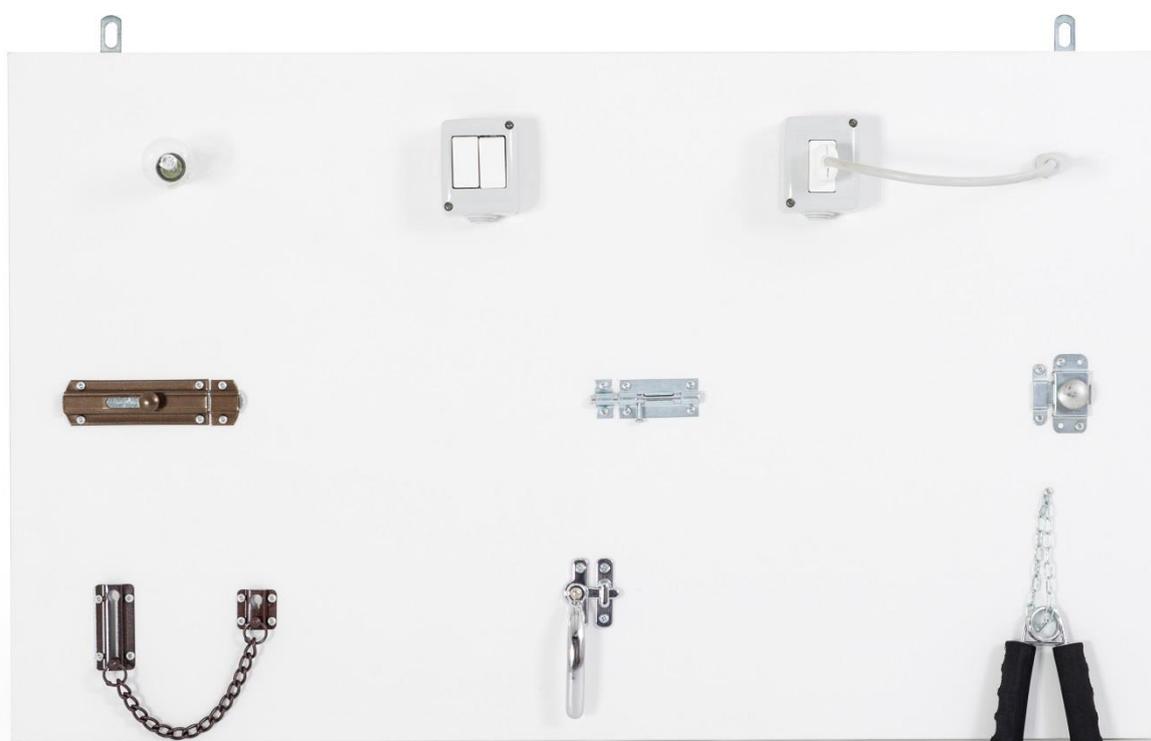

MODELLI PANNELLO PER ERGOTERAPIA

Descrizione	Codice
Pannello per ergoterapia 9 elementi	1315060

FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@mailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

Indice

INTRODUZIONE	pag. 3
SICUREZZA – GARANZIA	pag. 4
SMALTIMENTO – DESCRIZIONE	pag. 5
ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO – MODALITÀ D’USO AVVERTENZE	pag. 6
MANUTENZIONI – PULIZIA	pag. 7
REGISTRAZIONE INTERVENTI	pag. 8

INTRODUZIONE

Questo manuale ha lo scopo di fornire agli utilizzatori ed addetti le informazioni necessarie affinché, oltre ad un adeguato utilizzo del pannello per ergoterapia, siano in grado di gestirle in autonomia e sicurezza.

Il manuale contiene informazioni inerenti all'aspetto tecnico, al funzionamento, alla manutenzione, ai ricambi ed alla sicurezza.

Il Libretto Istruzioni deve sempre seguire l'apparecchiatura e deve essere accuratamente conservato al fine di non comprometterne lo stato di leggibilità.

In caso di cessione a terzi è necessario trasmettere il presente manuale insieme agli altri documenti così come previsto dalle disposizioni inerenti al Regolamento UE 2017/745.

Uso previsto

Dispositivo da appendere alla parete equipaggiato con No. 9 sussidi per simulazione di attività domestiche quotidiane. Gli elementi sono fissati al pannello.

Dispositivo per la riabilitazione di soggetti affetti da limitazioni funzionali che necessitano di riabilitazione per dita, mano e polso.

Dati del costruttore:

FISIOTECH SRL

Sede Operativa: Via Toniolo, 44/E-F

31028 VAZZOLA (TV) - Italia

Tel. +39 0438 470342

Fax +39 0438 478762

info@fisiotech.com

Immagazzinaggio

L'apparecchiatura non richiede particolari condizioni ambientali. Deve essere utilizzata all'interno di un edificio con temperatura ammesse da 5° a 40°C e con umidità compresa tra 10% e 80%.



ATTENZIONE! Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il pannello per ergoterapia.

FISIOTECH SRL declina ogni responsabilità e non risponde per danni a persone e/o cose causate da uso non conforme del pannello o eseguito da personale negligente o non qualificato o dalla mancata osservanza di tali istruzioni.

SICUREZZA



ATTENZIONE!

Il pannello non deve essere utilizzato:

- Senza aver effettuato tutte le previste regolazioni e messe a punto dedicate.
- Quando l'uso è controindicato o genera gravi disagi al paziente.
- Con manomissioni e/o modifiche sul prodotto originale.
- In configurazione impropria o quando ci sia il sospetto che possa arrecare danno al paziente.
- Le parti che compongono il pannello per ergoterapia possono incendiarsi se messe in contatto con fiamme libere.
- Non versare liquidi sulle parti metalliche.

L'idoneità fisica e psichica dell'utilizzatore a far uso dei sussidi deve essere approvata da uno specialista

- E' vietato l'utilizzo del seguente dispositivo per fini diversi da quanto definito nel seguente manuale.
- E' vietato l'utilizzo del seguente dispositivo esposto alle intemperie.
- E' vietato l'utilizzo del seguente dispositivo senza aver effettuato idonea installazione a muro.
- E' vietato versare liquidi sul dispositivo.
- L'utilizzatore deve essere assistito dal terapeuta durante l'utilizzo.
- Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche.



ATTENZIONE!

- Per un utilizzo corretto del dispositivo fare riferimento attentamente al seguente manuale
- Mantenere il prodotto imballato lontano da qualsiasi fonte di calore in quanto l'imballo è fatto di cartone.
- La vita utile del dispositivo è determinata dall'usura di parti non riparabili e/o sostituibili.
- Prestare sempre molta attenzione alla presenza di parti in movimento che potrebbero causare intrappolamenti agli arti e lesioni personali.
- Prestare sempre attenzione alla presenza di bambini.
- Consultare sempre il Vostro medico o terapeuta prima di eseguire qualsiasi terapia riabilitativa.

GARANZIA

Il pannello per ergoterapia gode di una garanzia che copre solamente i difetti di fabbricazione per 24 mesi dalla data di consegna. La garanzia non copre: i materiali di consumo e quelli di normale usura quali: tutti i No. 9 sussidi, i guasti causati da urti e/o cadute, l'errato o improprio uso, l'uso da parte di personale non qualificato. Qualora l'apparecchiatura risulti manomessa la garanzia decade automaticamente. Le riparazioni in garanzia si intendono presso nostra sede operativa e previa autorizzazione. Il materiale da riparare in garanzia ci dovrà pervenire in porto franco e con imballo originale. Per la riparazione oltre alla richiesta scritta ci dovrà pervenire copia della fattura e del documento di trasporto.

SMALTIMENTO



La presenza di questo simbolo su un prodotto indica che esso non deve essere gettato tra i rifiuti generici ma raccolto a parte per operazioni di riciclaggio o smaltimento a norma di legge.



ATTENZIONE! Il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata." Significa che non deve essere gettato tra i rifiuti generici ma va quindi raccolto per operazioni di riciclaggio o smaltimento a norma di legge portandolo o depositandolo presso i centri di raccolta differenziata predisposti dalle varie amministrazioni locali.


DESCRIZIONE PANNELLO PER ERGOTERAPIA

Pannello per ergoterapia da appendere alla parete equipaggiato con No 9 sussidi per simulazione di attività domestiche quotidiane.

In particolare il pannello configurato si compone dei seguenti sussidi:

1. Lampadina
2. Interruttore
3. Spina elettrica
4. Chiavistello scorrevole
5. Chiavistello girevole
6. Cricchetto a scorrimento
7. Catenella per porta
8. Maniglia per finestra/porta
9. Manubrio a forca.

Il pannello già configurato viene fornito senza specifica ferramenta.

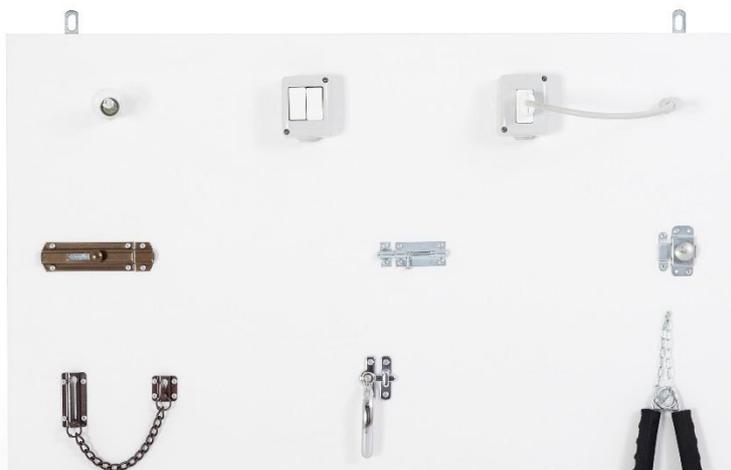

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO PANNELLO PER ERGOTERAPIA

Prima di procedere al montaggio accertare l'idoneità strutturale dell'ambiente e l'adeguatezza dello spazio a disposizione.

Considerare che per l'installazione le strutture necessitano di competenza tecnica, idonea attrezzatura e di almeno un assistente ai lavori.

Disimballare e movimentare il pannello con la massima cura: se si notano anomalie nell'imballo e nel prodotto non proseguire nell'installazione ma avvisare tempestivamente il Costruttore.

- Appoggiare il pannello al muro assicurandosi che sia dritto e all'altezza desiderata.
- Con la punta di una matita indicare i due punti di foratura del muro (al centro dei due occhielli)
- Forare il muro con attrezzatura adatta al tipo di muratura
- Inserire i tasselli precedentemente acquistati idonei al tipo di muratura
- Agganciare il pannello di ergoterapia con i due occhielli ai tasselli

AVVERTENZE PER L'USO



ATTENZIONE!

- Assicurarsi che il pannello per ergoterapia sia fissato correttamente al muro.
- Verificare il corretto funzionamento e il buono stato di tutti i No 9 sussidi.

AVVERTENZE



ATTENZIONE! L'operatore non deve mai lasciare il paziente incustodito. FISIOTECH non risponde per danni a persone e/o cose causate dall'uso del dispositivo da parte di personale negligente e/o non qualificato.

MANUTENZIONI

Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti da tecnici specializzati, o persone con conoscenza del contenuto del presente libretto istruzioni.

Verificare le condizioni di sicurezza dell'apparecchio dopo ogni situazione critica come ad esempio caduta, urti violenti, versamento di liquidi, ecc. ed ogni qualvolta si abbiano dei dubbi sullo stato di sicurezza dell'apparecchio.



ATTENZIONE!

- In evidenza di pericolo per la sicurezza, il dispositivo deve essere immediatamente disattivato senza possibilità di utilizzo finché il pericolo non sia stato eliminato.

MANUTENZIONI	COME FARE
Il pannello per ergoterapia non ha bisogno di particolari manutenzioni, ma si raccomanda di:	Controllare ogni 3 mesi circa, o dopo un uso particolarmente intenso, che sia ben fissato alla parete. Ispezione visiva e funzionale di tutti i No. 9 sussidi.

PULIZIA

Spolverare delicatamente e in caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido o con una soluzione di detergente neutro, risciacquando con acqua. Lasciare asciugare evitando l'esposizione diretta alla luce del sole.

**N.B. EVITARE ASSOLUTAMENTE DI UTILIZZARE PRODOTTI ACIDI, ALCALINI O SOLVENTI
COME AD ESEMPIO L'ACETONE O IL DILUENTE**

