

MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

PHYSIO ROLL



MODÈLES

Description	Code
Physio roll bleu 30cm	1411071
Physio roll rouge 40cm	1411072
Physio roll jaune 55cm	1411073
Physio roll bleu 70cm	1411074
Physio roll rouge 85cm	1411075

FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F-G - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

Tables des matières

INTRODUCTION	p. 3
MODÈLES – SÉCURITÉ	p. 4
GARANTIE – CHARGE MAXIMALE – GONFLAGE	p. 5
AVERTISSEMENT – NETTOYAGE – ACCESSOIRES	p. 6
EXERCICES	p. 7
MASSAGES – THÉRAPIE AVEC LES ENFANTS	p. 8

INTRODUCTION

Ce manuel veut donner aux utilisateurs et aux professionnels toutes les informations nécessaires à l'utilisation adéquate, autonome et sans risques du Physio Roll.

Ce manuel contient informations sur l'aspect technique, le fonctionnement, l'entretien, les pièces détachées et la sécurité du Physio Roll.

Veuillez conserver ce manuel toujours avec l'équipement et de façon que sa lisibilité ne soit pas compromise.

En cas de cession à des tiers, veuillez transférer ce manuel avec tous les autres documents comme prévu par les dispositions du Règlement UE 2017/745.

Utilisation prévue

Ce dispositif est un support spécifique pour le rétablissement de pathologies neurologiques et orthopédiques, le traitement de la dystrophie musculaire, les exercices de rééducation et antalgiques, le renforcement et maintien du tonus musculaire, le Pilates, l'entraînement fonctionnel et le sport. Le produit est un dispositif médical de classe I.

Détails du fabricant

Ledraplastic Spa

Détails du distributeur

FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F-G

31028 VAZZOLA (TV) - Italie

Tel. +39 0438 470342

Fax +39 0438 478762

info@fisiotech.com



ATTENTION ! Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser le Physio Roll.

FISIOTECH SRL décline toute responsabilité et ne répond pas des dommages occasionnés à personnes et/ou biens à cause d'une utilisation non conforme, ou si le Physio Roll a été utilisé par personnel négligent ou pas qualifié, ou si les instructions ci-explicitées n'ont pas été suivies.

MODÈLES

CODE	DESCRIPTION
1411071	Ø 30 cm L. 50 cm Bleu
1411072	Ø 40 cm L. 65 cm Rouge
1411073	Ø 55 cm L. 90 cm Jaune
1411074	Ø 70 cm L. 115 cm Bleu
1411075	Ø 85 cm L. 130 cm Rouge

SÉCURITÉ



EN CAS DE PERCEMENT, LA BALLE ÉCLATE.



ATTENTION :

- Risque d'étouffement. Dispositif ne convenant pas aux enfants âgés de moins de 36 mois. Contient des petites pièces qui pourraient être ingérées ou inhalées.
- À utiliser seulement pour exercices avec le poids du corps. Ne convenant pas à l'utilisation avec haltères ou autres poids. L'utilisation de poids avec le Physio Roll pourrait causer de dommages à l'utilisateur.
- Nous recommandons la surveillance par un adulte en cas d'utilisation de la part d'un enfant.
- Ne pas réparer en cas de percement. Un produit réparé perd ses exigences de sécurité.
- Ne pas exposer le produit à de sources de chaleur ou à la lumière directe ; cela causerait la perte de ses caractéristiques physiques et chromatiques.

GARANTIE

Les Physio Roll ont une garantie de 12 mois depuis la date de livraison couvrant seulement les défauts de fabrication. La garantie ne couvre pas : l'utilisation mauvaise ou inappropriée, l'utilisation par personnel non qualifié. Si l'équipement a été modifié, la garantie est automatiquement invalide. Les réparations sous garantie sont effectuées chez notre usine et après autorisation. Les biens à réparer sous garantie nous devront être livrés en fret payé et dans leur emballage original. L'envoi d'une demande écrite, d'une copie de la facture et du bon de livraison est fondamental pour la réparation sous garantie.


CHARGE MAXIMALE



GONFLAGE

LE GONFLAGE DOIT ÊTRE FAIT PAR UN ADULTE. NE PAS GONFLER AU-DELÀ DU DIAMÈTRE INDICÉ SUR LE PRODUIT.

Gonfler avec la pompe en utilisant la soupape (Photo 1) si nécessaire. MAX ATM 0.1! PSI 1.5.
Gonfler à température ambiante (20° C / 70° F) loin d'objets pointus.
Un gonflage vigoureux et à intervalles pour avoir le diamètre indiqué.

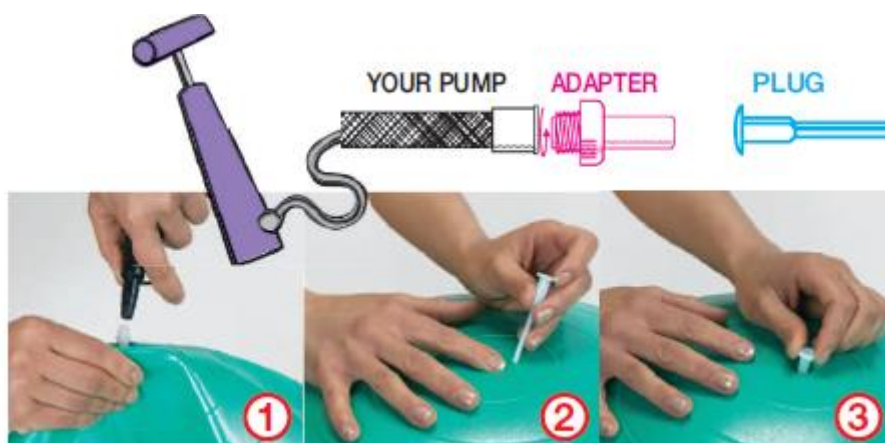

AVVERTISSEMENT



Avant chaque utilisation vérifiez :

- l'intégrité du produit ;
- d'être loin de sources de chaleur et sur surfaces sans objets pointus (zip, anneaux, montres, etc).

NETTOYAGE

Nettoyez avec de l'eau et du savon.


Ne pas utiliser brosses, éponges abrasives et substances chimiques.

Ne pas utiliser systèmes de stérilisation.

OPTIONS

CODE	DESCRIPTION
1411160	Pompe à aiguille
1411161	Pompe à main, idéale pour gonfler balles moyennes et grandes

EXERCICES

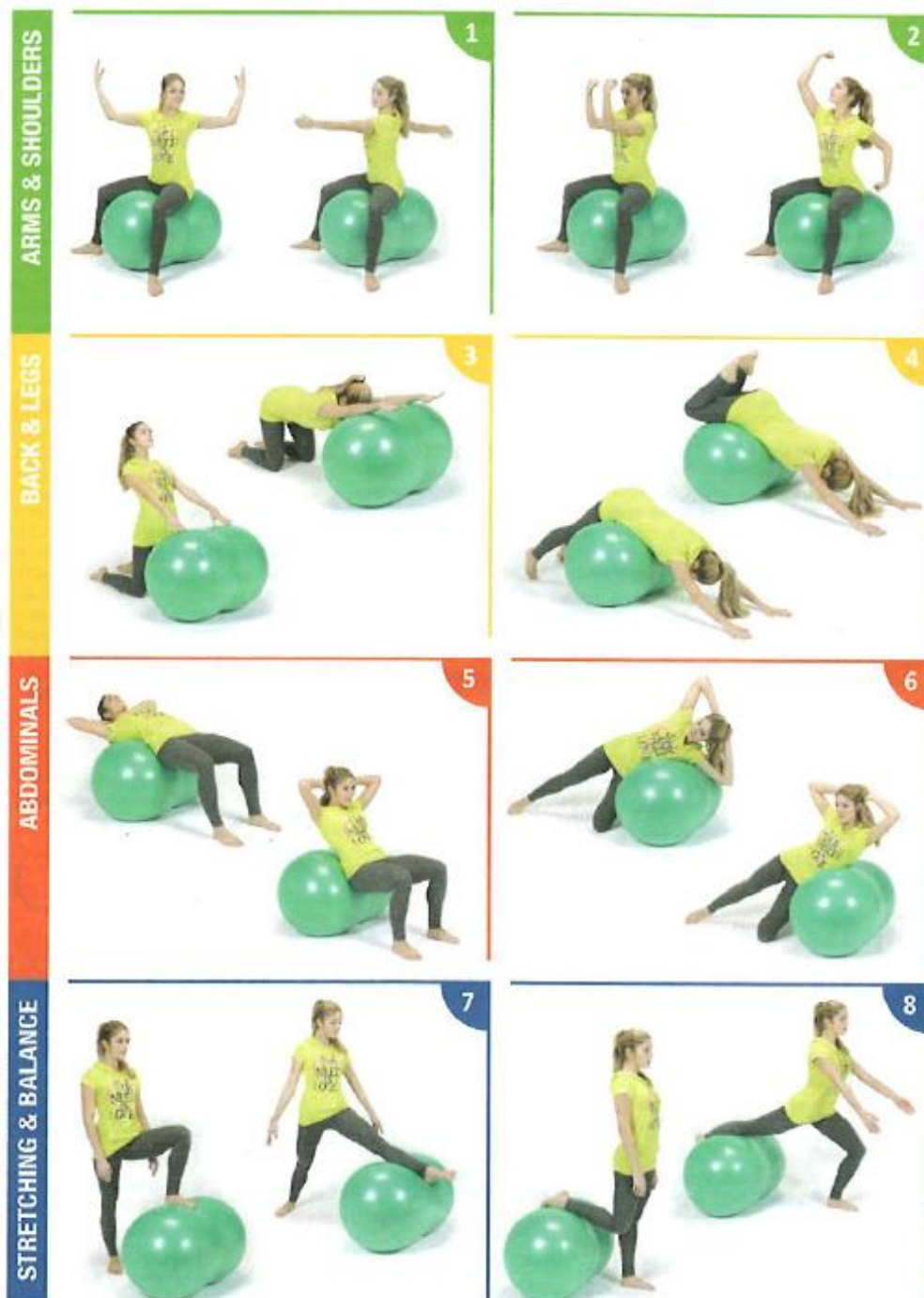

MASSAGES



THÉRAPIE AVEC LES ENFANTS

