

# MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

## DÉAMBULATEUR PLIANT



### MODÈLES DÉAMBULATEUR

Description	Code
Déambulateur 4 embouts	1712010
Déambulateur 2 embouts 2 roulettes	1712020

#### FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

# Table des matières

<b>INTRODUCTION</b>	<b>p. 3</b>
<b>SÉCURITÉ – GARANTIE – SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES</b>	<b>p. 4</b>
<b>TRANSPORT/STOCKAGE/ÉLIMINATION – INSTRUCTIONS</b>	<b>p. 5</b>
<b>ENTRETIEN – NETTOYAGE</b>	<b>p. 6</b>

## INTRODUCTION

Ce manuel veut donner aux utilisateurs et aux professionnels toutes les informations nécessaires à l'utilisation adéquate, autonome et sans risques du déambulateur.

Ce manuel contient informations sur l'aspect technique, le fonctionnement, l'entretien, les pièces détachées et la sécurité.

Veuillez conserver ce manuel toujours avec l'équipement et de façon que sa lisibilité ne soit pas compromise. En cas de cession à des tiers, veuillez transférer ce manuel avec tous les autres documents comme prévu par les dispositions de la directive des appareils médicaux.

### Détails du fabricant

PIAI ORTOTECH SRL

Via A. Meucci, 32

31029 VITTORIO VENETO (TV)

Italie

P.I. 04193400266

Tel. 0438/500884

### Détails du distributeur

**FISIOTECH SRL**

Lieu d'activité: Via Toniolo, 44/E-F

31028 VAZZOLA (TV) - Italie

Tel. +39 0438 470342

Fax +39 0438 478762

[info@fisiotech.com](mailto:info@fisiotech.com)



**ATTENTION ! Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser le déambulateur.**

**FISIOTECH SRL décline toute responsabilité et ne répond pas des dommages occasionnés à personnes et/ou biens à cause d'une utilisation non conforme du dispositif, ou s'il a été utilisé par personnel négligent ou pas qualifié, ou si les instructions ci-explicitées n'ont pas été suivies.**

## SÉCURITÉ



### INSTRUCTIONS / AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

- Le choix du dispositif doit être fait par l'utilisateur, aidé par le personnel médical-orthopédique
- Les indications de ce manuel doivent être suivies pour éviter tout dommage aux personnes ou aux choses.
- L'entreprise se réserve le droit de modifier les données et l'équipement de ce manuel.
- Faites attention à l'exposition au soleil, les surfaces pourraient avoir de températures dangereuses.
- Utilisez seulement sur surfaces droites, stables et lisses.
- N'utilisez pas sur marches, escaliers ou escalators.
- Faites attention aux tapis, câbles électriques ou autres objets sur le sol.
- En cas de transfert du déambulateur à un fauteuil roulant, bloquez les freins des deux dispositifs.
- N'utilisez pas le produit au-delà de la charge maximale.
- N'éloignez pas trop le déambulateur du corps, il pourrait échapper.
- N'utilisez pas le déambulateur avec assise comme s'il était un fauteuil roulant.
- Avant de s'asseoir, freiner le déambulateur et ne pas utiliser du côté panier.

## GARANTIE

Les déambulateurs en alliage léger ont une garantie de 24 mois dès la date d'achat couvrante seulement les défauts de conception, matériaux, de fabrication et assemblage. La garantie ne couvre pas les dommages causés par l'usure, les modifications et l'utilisation mauvaise.

Les biens à réparer sous garantie nous devront être livrés en fret payé et dans leur emballage original. L'envoi d'une demande écrite, d'une copie de la facture et du bon de livraison est fondamental pour la réparation sous garantie.

La garantie est invalide sans une épreuve de l'achat, s'il y a eu des tentatives de réparation non autorisées, pour des dommages accidentels, ou si les instructions et les avertissements de ce manuel n'ont pas été suivis.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Code 1712010 Déambulateur en alliage léger, pliable, réglable en hauteur - 4 embouts.

Code 1712020 Déambulateur en alliage léger, pliable, réglable en hauteur - 2 roulettes fixes diamètre 60 mm - 2 embouts.

ISO DM 332/1999: 12.06.03.003 - 12.06.09.109 - 12.06.09.130.

Réglage hauteur	Da 80 a 95 cm
Longueur	45 cm
Largeur	55 cm
Diamètre roulettes	8 cm
Poids	2,5 kg
Charge maximale utilisateur	110 kg

## TRANSPORT – STOCKAGE - ÉLIMINATION

En cas de transport par de tiers, assurez-vous que les biens soient protégés par un emballage en carton solide.

Pendant les transports faits par vous ou pendant le stockage, vérifiez la propreté des voitures et des pièces. Si nécessaire protégez avec un drap anti poussière.

Le produit ne contient pas de composants classifiés comme déchet spécial. À l'élimination vérifiez et suivez les normes locales sur le recyclage.

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION SPÉCIFIQUES – AVERTISSEMENT RISQUES



**ATTENTION !**

<p>Modèle deux roulettes deux embouts</p>	<p>Soulever le déambulateur et le porter devant soi en s'assurant que les deux roulettes et les deux embouts touchent le sol. Soulever seulement le côté des embouts pour éviter que le déambulateur échappe.</p>
---	---



Transferts avec freins bloqués



Marcher avec modèle quatre embouts

<p>Réglage hauteur poignées</p>	<p>Appuyez sur le blocage et débrochez la partie allongeable en correspondance des trous. Avec le bras tendu, la poignée doit être à la hauteur du poignet. Avec la main appuyée sur la poignée le coude doit être plié d'environ 20-30°. Si présente, suivez l'indication orthopédique.</p>
<p>Ouvrir et plier le déambulateur</p>	<p>Appuyez sur le bouton de déblocage sur la traverse supérieure et plier les côtés du déambulateur contre eux-mêmes</p>

## **ENTRETIEN**

- Vérifiez chaque 3 mois l'état des roulettes et des embouts.
- Vérifiez chaque 3 mois l'état des freins et les régler si nécessaire.
- Vérifiez chaque 6 mois le serrage de vis, des boulons et des rivets.
- Vérifiez chaque 6 mois les parties en mouvement et les huiler si nécessaire.
- Remplacez immédiatement les parties défectueuses

## **NETTOYAGE**

- Nettoyage ordinaire : avec eau et savon neutre.
- Nettoyage extraordinaire ou assainissement : jet de vapeur à basse pression.
- Nettoyez et séchez immédiatement en cas de contact avec sable et eau de mer.
- Pour les entretiens extraordinaires faire référence à l'entreprise ou au revendeur.