

MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

POULIE D'EXERCICE SIMPLE



MODÈLES

Description	Code
Poulie d'exercice simple	1315010

FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F-G - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

Tables des matières

INTRODUCTION	p. 3
SÉCURITÉ – GARANTIE – DÉBALLAGE – ÉLIMINATION	p. 4
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES – ACCESSOIRES LIVRÉS	p. 5
INSTRUCTIONS DE MONTAGE – MODE D'EMPLOI	p. 6
AVERTISSEMENT – ENTRETIEN – NETTOYAGE	p. 7
ACCESSOIRES	p. 8
FEUILLE DES ENTRETIENS	p. 9

INTRODUCTION

Ce manuel veut donner aux utilisateurs et aux professionnels toutes les informations nécessaires à l'utilisation adéquate, autonome et sans risques de la poulie d'exercice.

Ce manuel contient informations sur l'aspect technique, le fonctionnement, l'entretien, les pièces détachées et la sécurité de la poulie d'exercice.

Veuillez conserver ce manuel toujours avec l'équipement et de façon que sa lisibilité ne soit pas compromise.

En cas de cession à des tiers, veuillez transférer ce manuel avec tous les autres documents comme prévu par les dispositions du Règlement UE 2017/745.

Utilisation prévue

La poulie d'exercice simple permet d'effectuer exercices de renforcement et rééducation des membres supérieurs et inférieurs.

Détails du fabricant

FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F-G

31028 VAZZOLA (TV) - Italie

Tel. +39 0438 470342

Fax +39 0438 478762

info@fisiotech.com

Stockage

En cas de stockage, respectez ces conditions environnementales : humidité relative 10% - 90 % - température -10°C - +50°C – Endroit propre.



ATTENTION ! Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser la poulie d'exercice.

FISIOTECH SRL décline toute responsabilité et ne répond pas des dommages occasionnés à personnes et/ou biens à cause d'une utilisation non conforme de la poulie d'exercice, ou si la poulie d'exercice a été utilisée par personnel négligent ou pas qualifié, ou si les instructions ci-explicitées n'ont pas été suivies.

SÉCURITÉ



ATTENTION ! La poulie d'exercice ne doit pas être utilisée :

- Avec une charge supérieure à celle déclarée par le producteur.
- Avec de charges non placées et divisées selon quant déclaré dans ce manuel.
- Avec de charges dynamiques (en mouvement).
- Sans avoir effectué l'assemblage, ancrage et réception.
- S'il y a eu de manipulations ou modifications sur l'original.
- En configuration impropre ou si vous soupçonnez qu'elle pourrait nuire à la santé du patient.
- Par enfants ou mineurs non surveillés.
- Exposée aux intempéries.



ATTENTION !

L'installation doit être faite par un technicien spécialisé qui a lu ce manuel et vérifié l'aptitude de la salle. Évaluez les possibles dangers de l'association d'autres dispositifs à l'équipement (exemple : poids supplémentaires, prises électriques, table de kinésithérapie réglable en hauteur avec déport latéral, ecc)

GARANTIE

La poulie d'exercice a une garantie de 24 mois depuis la date de livraison couvrant seulement les défauts de fabrication. La garantie ne couvre pas : les matériels consommables et à l'usure normale, les défaillances causées par chocs et/ou chutes, les défaillances causées par chocs et/ou chutes, l'utilisation mauvaise ou inappropriée, l'utilisation par personnel non qualifié. Si l'équipement a été modifié, la garantie est automatiquement invalide. Les réparations sous garantie sont effectuées chez notre usine et après autorisation. Les biens à réparer sous garantie nous devront être livrés en fret payé et dans leur emballage original. L'envoi d'une demande écrite, d'une copie de la facture et du bon de livraison est fondamental pour la réparation sous garantie.

DÉBALLAGE

Après avoir placé le contenu de l'emballage sur une surface adaptée, vous pouvez procéder à l'installation.



ATTENTION ! Soyez extrêmement prudents afin d'éviter blessures aux mains causées par cutters ou ciseaux ou autres outils. Nous recommandons d'utiliser des ciseaux pointe ronde pour éviter de blesser vos mains ou d'endommager l'équipement. Conservez l'emballage pour une possible restitution au fabricant.

ÉLIMINATION



Le déchet doit être éliminé suivant les règles du recyclage. Donc, il ne doit pas être jeté parmi les déchets ordinaires mais éliminé suivant les lois de votre Pays/région.



ATTENTION ! Le déchet doit être éliminé suivant les règles du recyclage. Donc, il ne doit pas être jeté parmi les déchets ordinaires mais éliminé suivant les lois de votre Pays/région.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Code article	1315010
--------------	---------

Structure en acier verni simple avec poulie et corde.
Charge maximale réglable avec disques poids 1 kg, max 8 kg.

Hauteur	195 cm
Largeur	30 cm
Profondeur	28 cm



ATTENTION ! Avant de monter et installer assurez-vous que :

- La structure soit adaptée
- La salle soit adaptée
- Il y ait l'espace nécessaire pour utiliser l'équipement.

Pour installer la poulie d'exercice de compétences techniques sont nécessaires. L'installation nécessite le travail de deux personnes.

ACCESSOIRES LIVRÉS

- 3 mt de corde en nylon 5 mm
- 1 mousqueton
- 2 poulie en fer
- 1 poignée anatomique

INSTALLATION

Placez la poulie d'exercice sur le mur, marquez les trous avec un crayon, puis percez en utilisant le foret le plus adapté aux chevilles que vous avez choisis (selon la maçonnerie). Insérez les chevilles et fermez tout.

MODE D'EMPLOI

1. Insérez les poids désirés selon l'exercice dans la barre des poids (A).
2. Pour les exercices effectués du haut vers le bas, les poignées doivent être insérées dans la fixation B. Pour les exercices effectués du bas vers le haut, les poignées doivent être insérées dans la fixation C.



ATTENTION !

- LE FABRIQUANT NE PEUT PAS RÉPONDRE D'UN INSTALLATION FAITE SANS CONTÔLE.
- LES STRUCTURES ONT ÉTÉ CONÇUES, RÉÇUES ET FABRIQUÉES POUR SOUTENIR EN TOUTE SÉCURITÉ LES POIDS DÉCLARÉS.

AVERTISSEMENT



ATTENTION ! Ne laissez jamais le patient seul pour qu'il ne tombe pas. Le fabricant ne répond pas des dommages à personnes et/ou biens causés par personnel négligent et/ou non qualifié.

ENTRETIEN

Les entretiens doivent être faits par un technicien spécialisé, un électricien ou par quelqu'un qui connaît les informations de ce manuel.

Vérifiez les conditions de sécurité de la poulie d'exercice après chaque situation critique comme chutes, chocs violents, déversements de substances liquides, et quand vous n'êtes pas sûrs des conditions de sécurité de la poulie d'exercice.



ATTENTION !

- S'il y a de risques pour la sécurité, la poulie d'exercice doit être désactivée immédiatement et ne peut pas être utilisée jusqu'à quand le risque n'a été éliminé.

ENTRETIEN	QUOI FAIRE
La poulie d'exercice n'a pas besoin d'un entretien en particulier. Nous vous recommandons de :	Huilez les parties chromées avec de l'huile de vaseline spray. Contrôlez les cordes et remplacez-les périodiquement ou quand elles sont usées.

NETTOYAGE

NETTOYAGE : Dépoussiérez avec un chiffon non abrasif sec ou légèrement humide et séchez.

OPTIONS

CODE	DESCRIPTION
1316052	Sangle à cheville avec anneau. Noir
1317105	Sangle à cheville
1316041	Disques en fonte

FEUILLE DES ENTRETIENS

[illegible]