

MANUALE D'USO E DI MANUTENZIONE

GABBIA PER PULEGGIO TERAPIA



Solo gabbia

MODELLI

Descrizione	Codice
Solo gabbia per puleggio terapia	137001

FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@mailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

Indice

INTRODUZIONE	pag. 3
SICUREZZA – GARANZIA – DISIMBALLO	pag. 4
SMALTIMENTO - CARATTERISTICHE TECNICHE	pag. 5
MONTAGGIO ED INSTALLAZIONE	pag. 6
ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO	pag. 7/12
AVVERTENZE – MANUTENZIONI – PULIZIA	pag. 13
ACCESSORI	pag. 14
REGISTRAZIONE INTERVENTI	pag. 15

INTRODUZIONE

Questo manuale ha lo scopo di fornire agli utilizzatori ed addetti le informazioni necessarie affinché, oltre ad un adeguato utilizzo delle parallele, siano in grado di gestirle in autonomia e sicurezza.

Il manuale contiene informazioni inerenti all'aspetto tecnico, al funzionamento, alla manutenzione, ai ricambi ed alla sicurezza.

Il Libretto Istruzioni deve sempre seguire l'apparecchiatura e deve essere accuratamente conservato al fine di non comprometterne lo stato di leggibilità.

In caso di cessione a terzi è necessario trasmettere il presente manuale insieme agli altri documenti così come previsto dalle disposizioni inerenti alla Direttiva Europea 93/42/CEE.

Uso previsto

La gabbia per puleggio terapia permette di eseguire in sicurezza esercizi di riabilitazione, posturali, trazione e rinforzo muscolare. Il professionista, unitamente alle imbragature, agli accessori potrà trovare tutti i punti di presa per procedere a diversi esercizi di terapia. Struttura autoportante costruite in acciaio verniciato a polveri epossidiche.

Dati del costruttore

FISIOTECH SRL

Sede Operativa: Via Toniolo, 44/E-F

31028 VAZZOLA (TV) - Italia

Tel. +39 0438 470342

Fax +39 0438 478762

info@fisiotech.com

Immagazzinaggio

In caso di immagazzinamento si devono rispettare le seguenti condizioni ambientali: umidità relativa 10% ÷ 90 % - temperatura -10°C ÷ +50°C. Luogo pulito.



ATTENZIONE! Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il lettino.

FISIOTECH SRL declina ogni responsabilità e non risponde per danni a persone e/o cose causate da uso non conforme della gabbia o fatto da personale negligente o non qualificato o dalla mancata osservanza di tali istruzioni.

SICUREZZA



ATTENZIONE! La gabbia non deve essere utilizzata:

- Con carichi superiori a quanto stabilito dal costruttore.
- Con carichi non collocati e ripartiti secondo quanto stabilito nel Manuale.
- Con carichi dinamici (In movimento).
- Senza aver effettuato il corretto assemblaggio, ancoraggio e collaudo.
- Con manomissioni e/o modifiche sul prodotto originale.
- In configurazione impropria o quando ci sia il sospetto che possa arrecare danno al paziente.
- Da bambini e minori non sorvegliati.
- In ambiente esposto alle intemperie.



ATTENZIONE!

L'installazione deve essere effettuata da un tecnico competente che abbia consultato il presente manuale, oltre ad aver accertato l'idoneità del locale.

Valutare i possibili pericoli derivanti dall'associazione di altre apparecchiature alla struttura (Esempio: pesi aggiuntivi, connessioni elettriche, lettino per terapia regolabile in altezza con traslazione laterale, ecc.)

GARANZIA

Le gabbie per puleggio terapia godono di una garanzia che copre solamente i difetti di fabbricazione per 24 mesi dalla data di consegna. La garanzia non copre: i materiali di consumo e quelli di normale usura quali: guasti causati da urti e/o cadute, l'errato o improprio uso, l'uso da parte di personale non qualificato. Qualora l'apparecchiatura risulti manomessa la garanzia decade automaticamente. Le riparazioni in garanzia si intendono presso nostra sede operativa e previa autorizzazione. Il materiale da riparare in garanzia ci dovrà pervenire in porto franco e con imballo originale. Per la riparazione oltre alla richiesta scritta ci dovrà pervenire copia della fattura e del documento di trasporto.

DISIMBALLO

Dopo aver depositato in luogo idoneo tutto il contenuto dell'imballo:


- Pannello superiore (No. 1)
- Piastre di giunzione (No. 4)
- Gambe struttura (No. 4)
- Pannelli verticali (No. 2)
- Viterie
- Piedini regolabili (No. 4)

si potrà procedere con l'installazione.



ATTENZIONE! Fare molta attenzione per evitare tagli alle mani per uso incauto di cutters o forbici o altri attrezzi usati per il taglio. Si consiglia di utilizzare forbici con punte arrotondate per evitare danni alle mani e all'attrezzatura. Conservare l'imballo per un'eventuale restituzione al costruttore. Smaltire reggette, pluriball e cartone come materiale di riciclaggio.

SMALTIMENTO

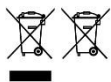

La presenza di questo simbolo su un prodotto indica che esso non deve essere gettato tra i rifiuti generici ma raccolto a parte per operazioni di riciclaggio o smaltimento a norma di legge.



ATTENZIONE! Il rifiuto deve essere oggetto di “raccolta separata.” Significa che non deve essere gettato tra i rifiuti generici ma va quindi raccolto per operazioni di riciclaggio o smaltimento a norma di legge portandolo o depositandolo presso i centri di raccolta differenziata predisposti dalle varie amministrazioni locali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice articolo

137001

Struttura in acciaio verniciato autoportante, con griglie in acciaio da 5 mm in rete maglia 5x5 cm zinco-cromate. Appoggio su piedini regolabili.



Lunghezza base	290 cm
Larghezza massima	124 cm
Lunghezza parte superiore	250 cm
Larghezza rete	93 cm
Altezza	210 cm
Carico di lavoro in sicurezza	300 kg
Peso della struttura	125 kg

MONTAGGIO ED INSTALLAZIONE




ATTENZIONE! Prima di procedere al montaggio e installazione assicurarsi:

- dell'idoneità strutturale
- dell'idoneità dell'ambiente
- dell'adeguatezza dello spazio a disposizione.

Per il montaggio e l'installazione della gabbia è necessario avere idonea competenza tecnica ed è necessario essere in almeno due persone.

LISTA DEL MATERIALE IN DOTAZIONE

- No. 1 Pannello superiore (A) struttura in acciaio zincato.
- No. 4 Piastra giunzione (B). Struttura in acciaio verniciato colore RAL 9001.
- No. 2 Gamba contrassegnate da "DX" (F dx). Struttura in acciaio verniciato colore RAL 9001.
- No. 2 Gamba contrassegnate da "SX" (F sx). Struttura in acciaio verniciato colore RAL 9001.
- No. 2 Pannelli verticali (H). Struttura in acciaio zincato.
- No. 4 viti esagonale (M) Ø 10x55 complete di: dado, rondella e copri dado.
- No. 16 viti esagonale (C) Ø 10x80 completa di: dado, rondella e copri dado.
- No. 16 viti esagonale (I) Ø 10x70 completa di: dado, rondella e copri dado.
- No. 4 piedini regolabili (G) Ø 80 completi di dado

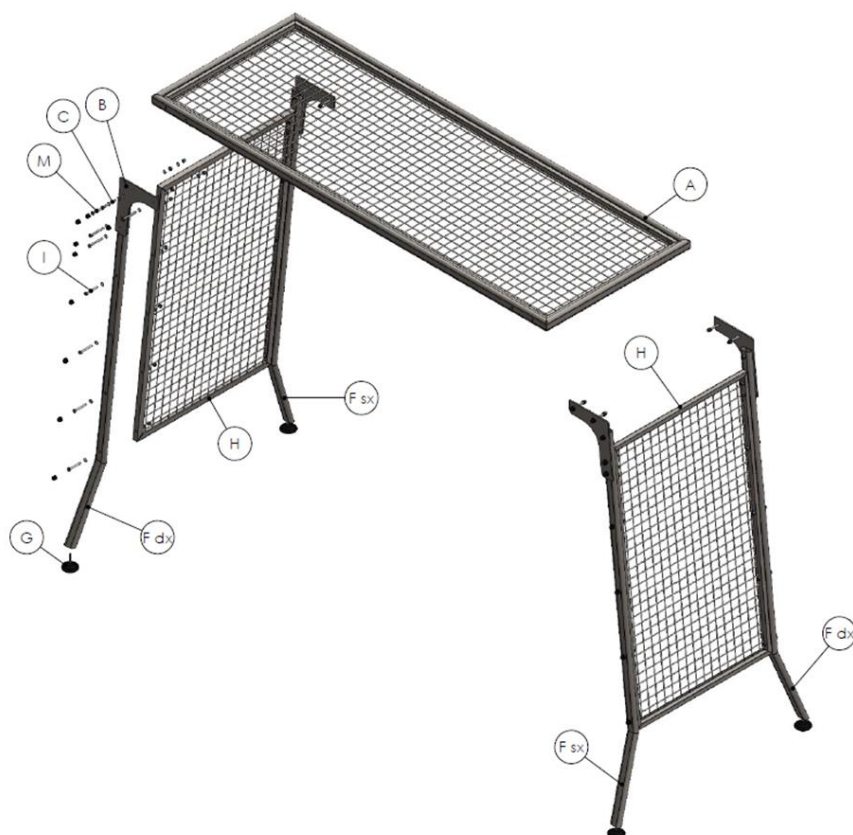

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

UTENSILI NECESSARI


Codice UTILIZZATO	FOTO
X	
Y	



ATTENZIONE! La gabbia deve essere montata con tutte le griglie, le viti e i dadi rivolti verso l'interno.

FASE 1


- Posizionare il pannello superiore (A) a terra, con la griglia rivolta verso l'alto, pre-assemblare le piastre di giunzione (B) sul pannello superiore (A) con le apposite viti (C), rondelle (D) e dadi (E).

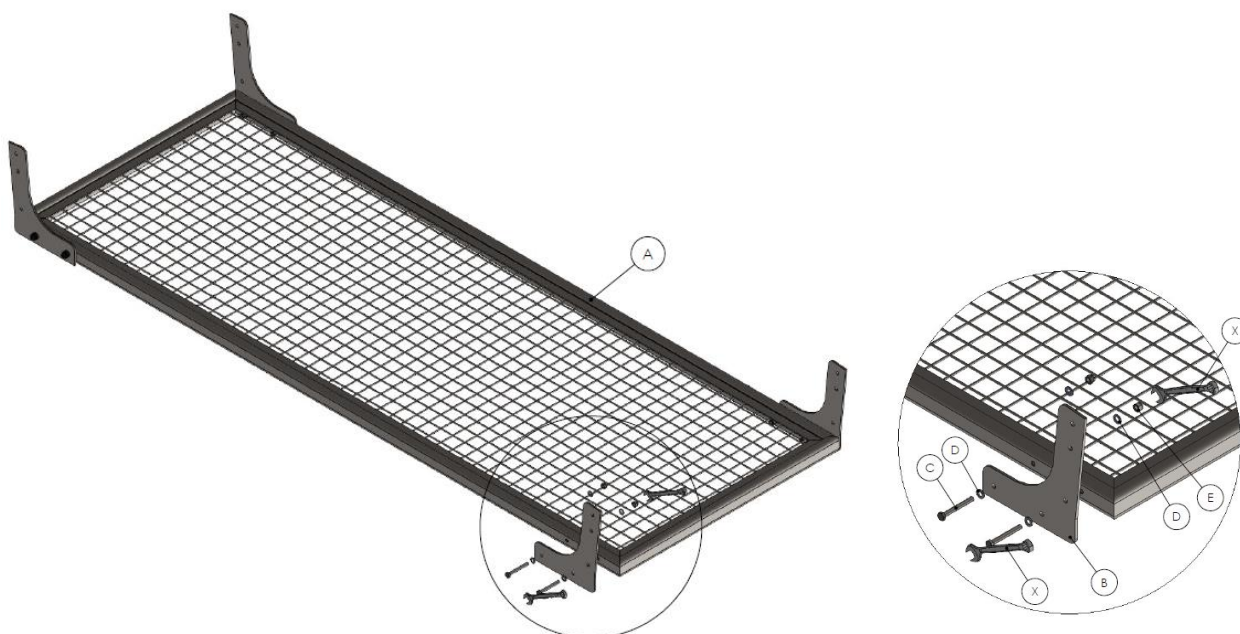

C	VITI M10x80	
D	RONDELLE	
E	DADI	

FASE 2


- Installare i piedini regolabili (G) alle gambe (F). Ripetere l'operazione per gambe **DX** e **SX**.

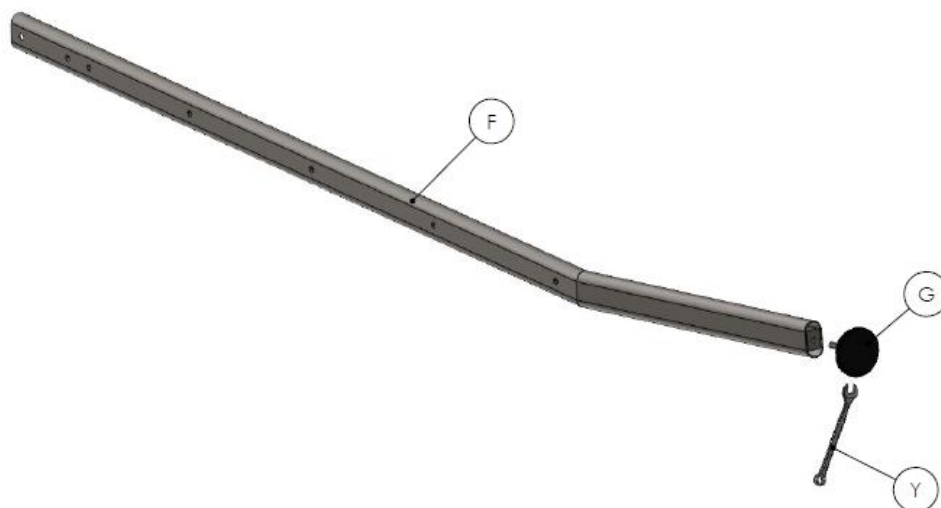

G	PIEDINI REGOLABILI	
---	--------------------	---

FASE 3


- Accostare le gambe (F) e i pannelli (H) fissandole con le viti (I), rondelle (D) e dadi (E).

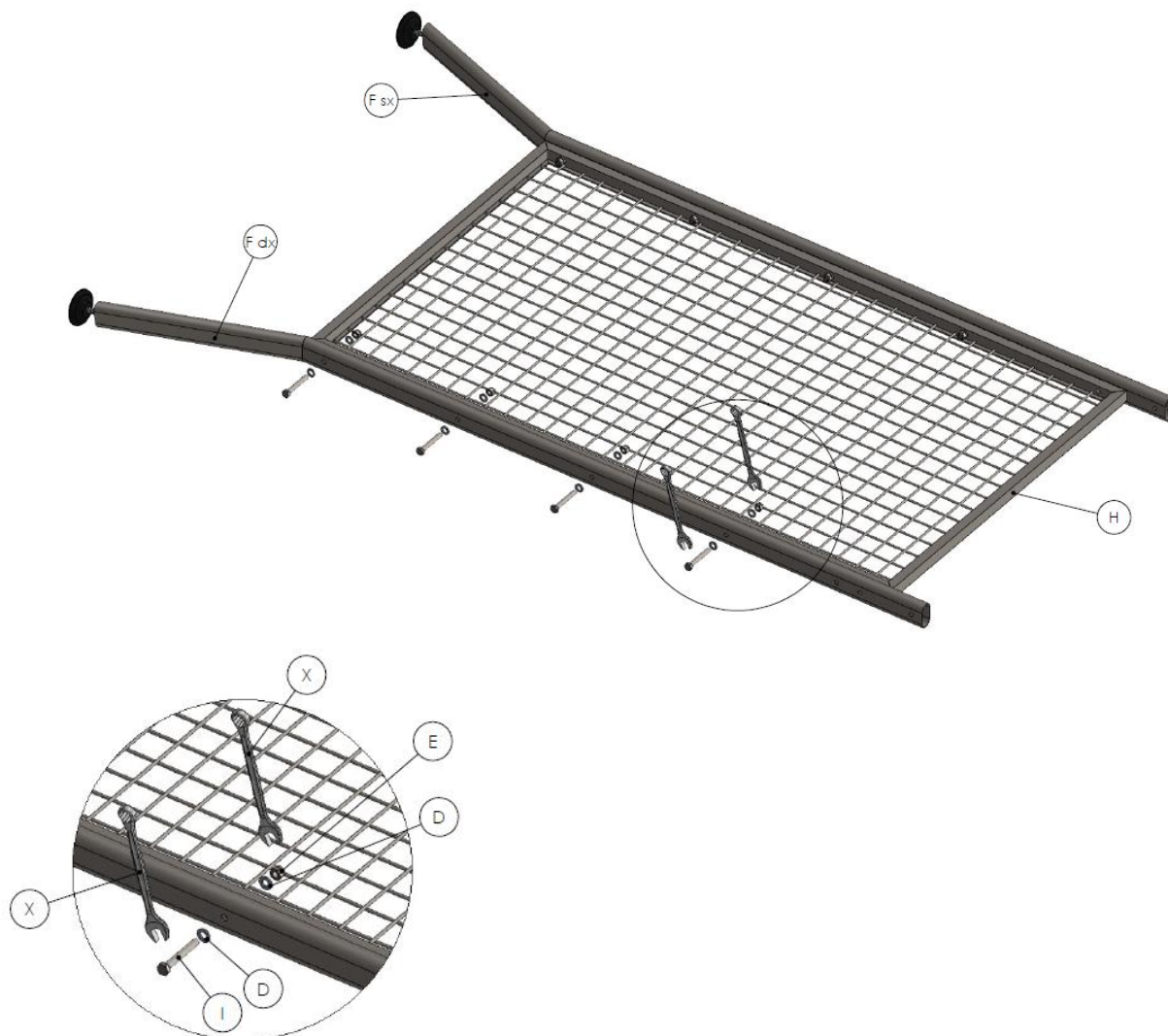

I	VITI M10x80	
D	RONDELLE	
E	DADI	

FASE 4

- Fissare i fianchi (L) al pannello superiore (A) con le apposite viti (C+M), rondelle (D) e dadi (E).

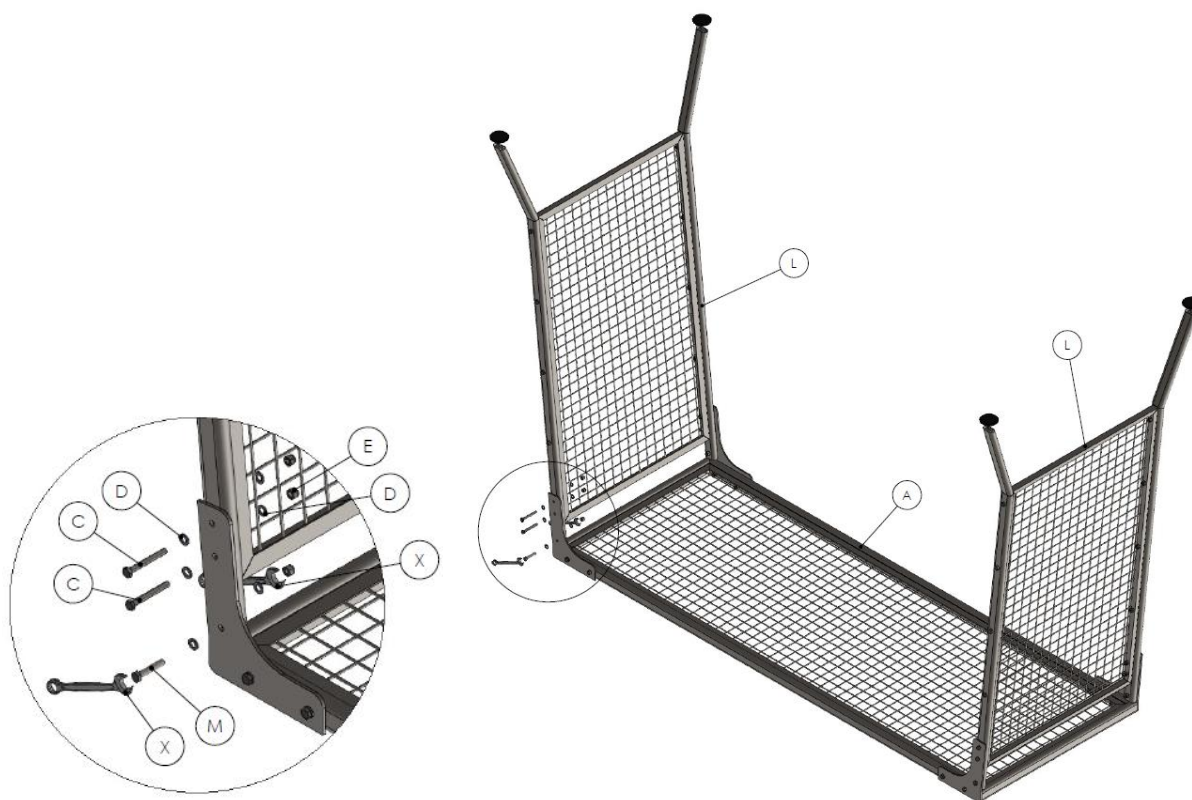

C	VITI M10x80	
D	RONDELLE	
E	DADI	
M	VITI M10X55	

FASE 5

- Fissare bene tutte le viti.

FASE 6


- Girare la gabbia per poterla utilizzare.

FASE 7

- Regolare i piedini.

FASE 8

- Montare i copri-dado (N).

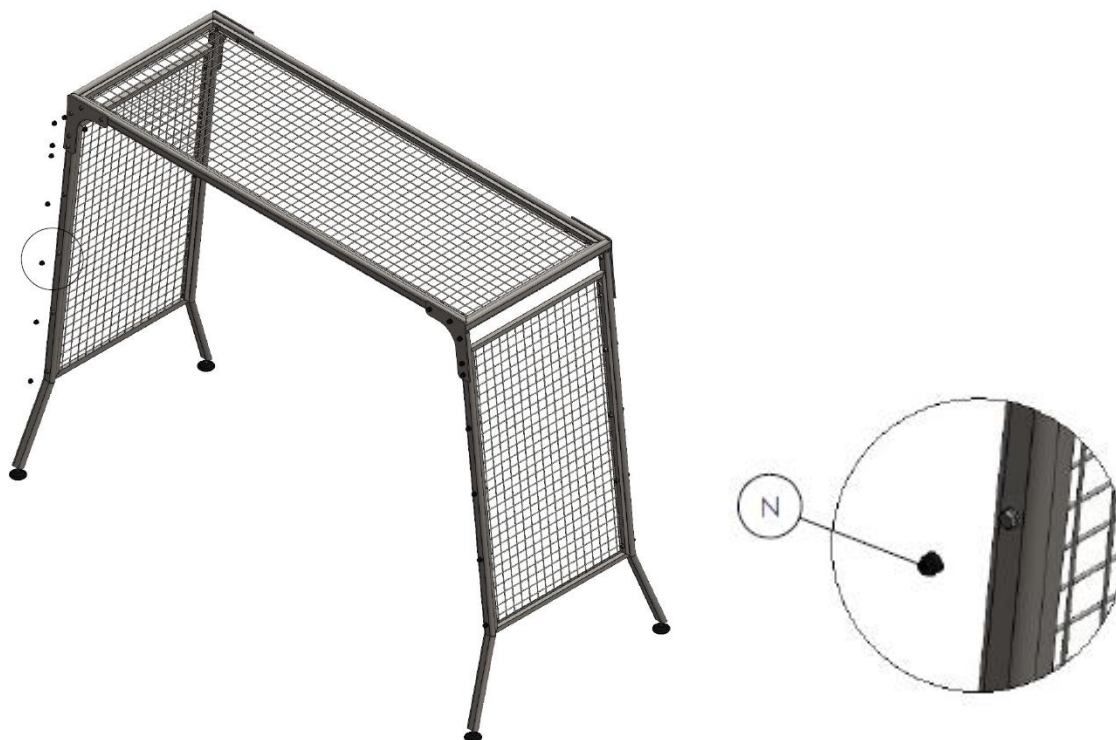

N	COPRIDADO	
---	-----------	---

AVVERTENZE



ATTENZIONE!

- IL COSTRUTTORE NON PUO' RISPONDERE DELL'INSTALLAZIONE ESEGUITA FUORI CONTROLLO.
- LE STRUTTURE SONO STATE PROGETTATE, COLLAUDATE E COSTRUITE PER SOPPORTARE IN SICUREZZA I CARICHI DELLE PORTATE DICHIARATE.



ATTENZIONE! L'operatore non deve mai lasciare il paziente incustodito per impedire il rischio di caduta del paziente. Il costruttore non risponde per danni a persone e/o cose causate dall'uso del dispositivo da parte di personale negligente e/o non qualificato.

MANUTENZIONI

Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti da tecnici specializzati, elettricisti o persone con conoscenza del contenuto del presente libretto istruzioni.

Verificare le condizioni di sicurezza dell'apparecchio dopo ogni situazione critica come ad esempio caduta, urti violenti, versamento di liquidi, ecc. ed ogni qualvolta si abbiano dei dubbi sullo stato di sicurezza dell'apparecchio.



ATTENZIONE!

- In evidenza di pericolo per la sicurezza, il dispositivo deve essere immediatamente disattivato senza possibilità di utilizzo finché il pericolo non sia stato eliminato.

MANUTENZIONI

COME FARE

La gabbia per puleggio terapia non ha bisogno di particolari manutenzioni, ma si raccomanda di:

Controllare ogni 3 mesi circa, o dopo un uso particolarmente intenso, il serraggio di viti e bulloni, verifica giochi dei volantini e pistoncini a molla che non girano a vuoto quando si chiude; assenza di lesioni e deformazioni strutturali.

PULIZIA

PULIZIA: spolverare con un panno non abrasivo asciutto o al massimo appena inumidito con po' di acqua e asciugare con cura.

OPTIONAL SU RICHIESTA

CODICE	DESCRIZIONE
137101	Talloniera
137102	Coppia di cavigliere
137103	Gambale
137104	Cinturino
137105	Cavigliera
137106	Fascia sollevamento gambe
137107	Fascia sollevamento braccio
137108	Fascia sollevamento testa
137109	Fascia sollevamento bacino
137110	Fascia sollevamento completo
137111	Fascia sollevamento tallone
137112	Fune lunghezza 20 mt
137113	Maniglia con impugnatura
137114	Carrucola
137115	Moschettone
136052	Cavigliera con gancio
137116	Gancio a "S"
136031	Sacchetto di sabbia con occhiello da kg 0,5
136032	Sacchetto di sabbia con occhiello da kg 1
136033	Sacchetto di sabbia con occhiello da kg 2
136034	Sacchetto di sabbia con occhiello da kg 3
136035	Sacchetto di sabbia con occhiello da kg 4
136036	Sacchetto di sabbia con occhiello da kg 5

[illegible]