

MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

FAUTEUIL DE PRÉLÈVEMENT



MODÈLS FAUTEUIL DE PRÉLÈVEMENT

Description	Code
Fauteuil de prélèvement	151020

FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA 03765100262 - Rea TV 296956

Table des matières

INTRODUCTION	p. 3
SÉCURITÉ	p. 4
AVERTISSEMENT – GARANTIE – EMBALLAGE ET DÉBALLAGE	p. 5
ÉLIMINATION – SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	p. 6
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES RÉSEAU ÉLECTRIQUE	p. 7
AVERTISSEMENT	p. 8
UTILISATION DU FAUTEUIL	p. 9-10
PROBLÈMES, CAUSES ET SOLUTIONS	p. 11
ENTRETIEN	p. 12
NETTOYAGE	p. 13
PIÈCES DÉTACHÉES, ACCESSOIRES	p. 14
FEUILLE DES ENTRETIENS	p. 15

INTRODUCTION

Ce manuel veut donner aux utilisateurs et aux professionnels toutes les informations nécessaires à l'utilisation adéquate, autonome et sans risques du fauteuil.

Ce manuel contient informations sur l'aspect technique, le fonctionnement, l'entretien, les pièces détachées et la sécurité du fauteuil.

Veuillez conserver ce manuel toujours avec le fauteuil et de façon que sa lisibilité ne soit pas compromise.

En cas de cession à des tiers, veuillez transférer ce manuel avec tous les autres documents comme prévu par les dispositions de la directive européenne 93/42/CEE.

Utilisation prévue

Le fauteuil de prélèvement est un fauteuil professionnel utilisé par professionnels du secteur pour les prélèvements, les examens et les traitements.

Détails du fabricant

FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F

31028 VAZZOLA (TV) - Italie

Tel. +39 0438 470342

Fax +39 0438 478762

info@fisiotech.com

Lieux d'utilisation

Les dispositifs médicaux décrits dans ce manuel sont conformes à la directive 93/42/CEE modifiée par l'Annexe VII de la directive 2007/47/CE. Lieux d'utilisation : soins ambulatoires en hôpital ou autre centre médical, où l'on utilise des équipements électromédicaux pour soigner les malades, ceux qui ont subi des blessures ou qui souffrent d'un handicap. À utiliser sous surveillance médicale pour le traitement, le diagnostic et le monitoring des patients.

Stockage

En cas de stockage, respectez ces conditions environnementales : humidité relative 10% - 90 % - température -10°C - +50°C – Endroit propre.



ATTENTION ! Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser le fauteuil.

FISIOTECH SRL décline toute responsabilité et ne répond pas des dommages occasionnés à personnes et/ou biens à cause d'une utilisation non conforme du fauteuil, ou si le fauteuil a été utilisé par personnel négligent ou pas qualifié, ou si les instructions ci-explicitées n'ont pas été suivies.

SÉCURITÉ



ATTENTION ! N'utilisez pas le fauteuil :

- Au-delà de la charge maximale d'utilisation déclarée.
- S'il repose sur une surface instable et/ou près de dénivellations (pentes, marches, etc.).
- S'il y a eu de manipulations ou modifications sur l'original.
- En atmosphère explosive, à risque de feu et/ou corrosive ou exposée aux intempéries.
- En configuration impropre ou si vous soupçonnez qu'elle pourrait nuire à la santé du patient.



ATTENTION !

- Ne pas insérer parties du corps dans les zones intéressées par le mouvement du fauteuil, qui sont labellisées.
- Laissez le fauteuil dans la position la plus basse possible et les plans en position horizontale si non surveillés.
- Assurez-vous que le patient ne peut pas actionner les commandes accidentellement
- Si le fauteuil est utilisé par personnes âgées ou à capacités d'équilibres réduites, on recommande de faire particulière attention ou d'utiliser systèmes de sécurité (barrières latérales).



ATTENTION ! PARTIES ELECTRIQUES

- L'installation électrique à laquelle vous allez brancher le fauteuil doit être conforme aux dispositions de loi de votre Pays.
- Ne pas débrancher en tirant le câble.
- Ne pas verser de liquides sur l'équipement.
- Débranchez le câble avant d'intervenir sur les parties électriques ou avant de déplacer la table.
- Ne pas endommager les câbles : évitez les écrasements ; ne débranchez pas en tirant le câble, mais utilisez la prise, etc.
- Vérifiez fréquemment les conditions du câble d'alimentation. S'il doit être remplacé, contactez le vendeur.
- Débranchez le fauteuil si vous ne l'utiliserez pas pendant longtemps. Cela va augmenter sa durée de vie et en limitera la consommation d'énergie (qui est quand même basse).
- En cas de défaillance ou dysfonctionnement, débranchez le câble.
- La mauvaise utilisation, la négligence, l'alimentation à tensions non conformes ou les tentatives de réparation par personnel non autorisé rendent la garantie automatiquement invalide.
- Ne coupez pas le câble s'il n'est pas compatible avec la prise. Nous recommandons de préparer la prise murale correcte et d'utiliser temporairement un adaptateur jusqu'à quand le problème n'a été résolu. La garantie est automatiquement invalide si vous coupez le câble.
- N'ouvrez pas le moteur/vérin, la pédale de commande et/ou télécommande manuelle : le faire rendra la garantie invalide. Si la table ne fonctionne pas (même si elle est correctement branchée) veuillez contacter le vendeur.

AVERTISSEMENT

- Les pédales de commande n'ont pas été conçues pour soutenir le poids d'une personne ; ne montez pas sur la pédale ou sur le cadre de commande périphérique.
- N'utilisez pas le système de régulation de la hauteur constamment, mais respectez le cycle d'utilisation décrit à p. 7 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES RÉSEAU ÉLECTRIQUE.
- Les mousses compressées et les parties plastiques de l'équipement peuvent s'enflammer si elles entrent en contact avec flamme nue.
- Les roulettes escamotables peuvent être utilisées seulement pour déplacer la table non chargée.
- Les lampes thérapeutiques peuvent endommager la sellerie.
- Les produits détergents corrosifs ou abrasifs peuvent endommager la sellerie.

GARANTIE

Le fauteuil de prélèvement a une garantie de 24 mois depuis la date de livraison couvrante seulement les défauts de fabrication. La garantie ne couvre pas : les matériels consommables et à l'usure normale comme : rembourrage/sellerie, pédale de commande/télécommande manuelle, câbles et tampons ; les défaillances causées par chocs et/ou chutes, l'utilisation mauvaise ou inappropriée, l'utilisation par personnel non qualifié. Si le sceau de garantie a été endommagé ou modifié, la garantie est automatiquement invalide. Si l'équipement a été modifié, la garantie est automatiquement invalide. Les réparations sous garantie sont effectuées chez notre usine et après autorisation. Les biens à réparer sous garantie nous devront être livrés en fret payé et dans leur emballage original. L'envoi d'une demande écrite, d'une copie de la facture et du bon de livraison est fondamental pour la réparation sous garantie.

EMBALLAGE

L'emballage est une boîte en carton avec un fond et un couvercle. La boîte est fermée avec des agrafes en métal et placée sur une palette spécifique. La boîte est fixée à la palette avec bandes de cerclage en plastique.



ATTENTION ! La table est lourde (environ 90 kilos) et surtout volumineuse. Dimensions emballage : longueur 195 cm x largeur 72 cm x hauteur 70 cm. Le colis doit être déplacé avec une extrême prudence. Le déchargement doit être effectué avec l'équipement approprié (chariot élévateur) ou par 3/4 personnes au moins.

DÉBALLAGE

Après avoir placé la palette avec la table sur une surface appropriée, coupez les bandes de cerclage en plastique qui fixent la table à la palette et qui ferment la boîte.



ATTENTION ! Soyez extrêmement prudents afin d'éviter blessures aux mains causées par cutters ou ciseaux ou autres outils. Nous recommandons d'utiliser des ciseaux pointe ronde pour éviter de blesser vos mains ou d'endommager la sellerie/le rembourrage. Conservez l'emballage pour une possible restitution au FABRICANT.


ÉLIMINATION



ATTENTION ! Le déchet doit être éliminé suivant les règles du recyclage. Donc, il ne doit pas être jeté parmi les déchets ordinaires mais éliminé suivant les lois de votre Pays/région.


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Hauteur réglable de 53 à 85 cm électriquement avec télécommande manuelle.
- Procline tête +90° réglable électriquement avec télécommande manuelle.
- Déclive plateau jambier -90° réglable électriquement avec télécommande manuelle.
- Position de Trendelenburg électrique + 21° avec télécommande manuelle.
- 4 roulettes à freins 100 mm
- Accoudoirs pliantes
- Repose jambes réglables manuellement, en hauteur et rotation
- Dimensions 180 X 54 X 53/85 cm.
- Charge maximale d'utilisation 180 kg uniformément répartis.
- Déport latéral : 0 cm
- Alimentation 230V 50Hz.
- Châssis en acier époxy.
- Rembourrage en mousse de polyuréthane densité 30 kg/m³ non-inflammable – épaisseur 4 cm.
- Sellerie simili cuir non-inflammable.

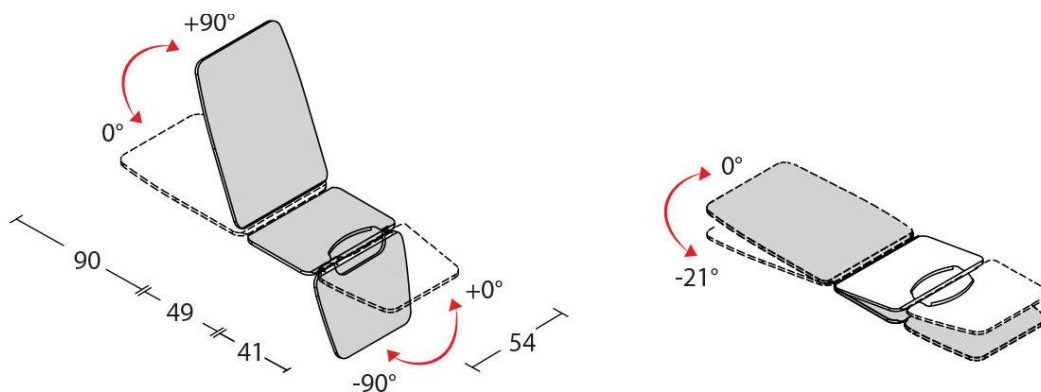

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES RÉSEAU ÉLECTRIQUE

- Alimentation 230 V 50Hz Classe II.
- Moteur à courant continu à basse tension 24V.
- Pédale de commande / Télécommande manuelle à basse voltage 24V.
- Commutateur de fin de course.
- Avec fusible thermique.

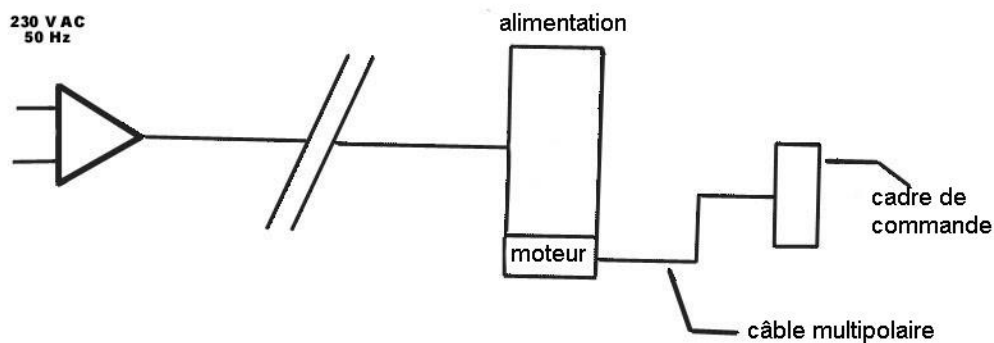

ATTENTION ! Ce moteur/vérin ne doit pas être utilisé constamment : 2 minutes d'utilisation continue / 18 minutes pause.

AVERTISSEMENT

Faites attention à :

1. Ne pas s'asseoir sur les repose jambes, le dossier ou les accoudoirs pour éviter tout renversement.
2. Ne pas utiliser les accoudoirs pour déplacer le fauteuil, en particulier avec le patient assis sur fauteuil.
3. En cas de déplacement latéral, rapprochez-vous au fauteuil, soulevez l'accoudoir et déplacez le fauteuil rapidement.
4. Ne pas faire pencher le patient au-delà des genoux pour éviter tout renversement.
5. Éviter les mouvements brusques du tronc vers le dossier quand le dos n'est pas encore y appuyé. Si vous avez besoin de faire pencher latéralement le patient, vérifiez qu'il n'y ait pas la possibilité de penchement.



ATTENTION ! Ne laissez jamais le patient seul pour qu'il ne tombe pas du fauteuil. Le FABRICANT ne répond pas des dommages à personnes et/ou biens causés par personnel négligent et/ou non qualifié.

UTILISER LE FAUTEUIL

RÉGLER LA HAUTEUR



La hauteur de la table de 53 à 85 cm est réglée avec télécommande manuelle.

PROCLIVE DU DOSSIER ET DÉCLIVE DU PLATEAU JAMBIER



Le proclive du dossier est réglé avec télécommande manuelle.

Le déclive du plateau jambier est réglé avec télécommande manuelle.

DÉPLACEMENT DU FAUTEUIL



ATTENTION !

Assurez-vous d'avoir inséré le frein avant de faire monter le patient.

Le frein est inséré avec le pied.


Si le levier est vers le bas, le frein est inséré. Si le levier est vers le haut, le frein est désactivé.

ACCOUDOIRS PLIANTES



Utilisez le bouton étoile pour baisser ou soulever les accoudoirs.

SI POURVU DE PORTE-ROULEA DRAP D'EXAMEN

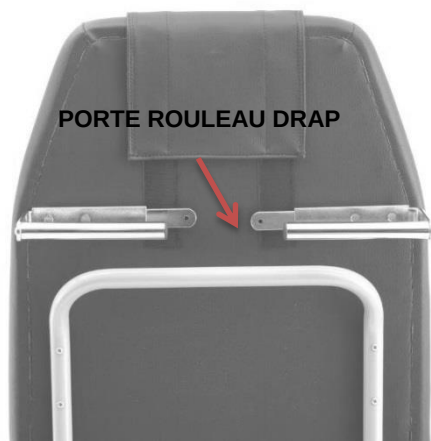

Le porte rouleau est placé sur le dossier.

SI POURVU D'APPUIE-TÊTE AMOVIBLE



Le coussin appuie-tête rembourré est fixé au dossier avec une fermeture éclair

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

PROBLÈME	CAUSE	REMÈDE
Le moteur/vérin ne fonctionne pas	Le dispositif n'est pas branché correctement à la prise murale ou l'électricité est coupée.	Branchez le câble à une prise avec une tension correspondante à celle indiquée à la page 7 de ce manuel – spécifications techniques réseau électrique.
Le moteur/vérin ne fonctionne pas	Problème grave, différent de celui au point 1 (fusible brulé ou boîtier de contrôle cassé).	Contactez le vendeur.

ENTRETIEN

Les entretiens doivent être faits par un technicien spécialisé, un électricien ou par quelqu'un qui connaît les informations de ce manuel.

Vérifiez les conditions de sécurité de la table après chaque situation critique comme chutes, chocs violents, déversements de substances liquides, et quand vous n'êtes pas sûrs des conditions de sécurité de la table.



ATTENTION !

- Débranchez le câble avant d'effectuer n'importe quel entretien.
- S'il y a de risques pour la sécurité, la table doit être désactivée immédiatement et ne peut pas être utilisée jusqu'à quand le risque n'a été éliminé.
- En cas de défaillance, les vérins, les boîtes de contrôle, les pédales de commande (ou cadres de commande périphériques) ou les télécommandes manuelles seront complètement remplacé(e)s. Ne pas ouvrir ou trafiquer ces parts, ou la garantie sera invalide et le FABRICANT déclinera toute responsabilité.

ENTRETIEN	QUOI FAIRE
Parts électriques	Le vérin n'a besoin d'aucun entretien, à l'exception de ceux indiqués dans "résolution des problèmes". Vérifiez le niveau d'usure du câble de la pédale de commande et celui de l'alimentation chaque 3 mois. En cas d'usure et/ou effilochage le câble doit être immédiatement remplacé. Vérifiez chaque 6 mois si les parts électriques émettent sons ou vibrations étranges pendant le mouvement, qui pourraient être symptôme d'anomalies dans l'vérin et/ou dans les mécanismes. Après ces opérations, complétez l'entretien avec un essayant la table en soulevant la charge maximale d'utilisation.
Parts mécaniques	Vérifiez chaque 3 mois ou après une utilisation intense le serrage de vis et boulons, le jeu des bagues et des pivots ; vérifiez l'absence de déformations structurales. Vérifiez les conditions des roulettes et des pivots de rotation chaque 3 mois. Vérifiez chaque 6 mois et, si nécessaire, lubrifiez, les parties en mouvement

NETTOYAGE

Nous recommandons de désinfecter vos mains ou les parts du corps qui touchent le patient ou autres surfaces des désinfectants à usage externe.



ATTENTION ! Débrancher avant les opérations de nettoyage des appareils électriques.

Nettoyage de la sellerie :

Dépoussiérez délicatement et, en cas de petites tâches, utilisez un chiffon humide ou une solution de détergent neutre. Rincez avec eau, sans tordre. Laissez sécher évitant d'exposer le fauteuil à la lumière du soleil.

Nettoyage de la part en acier époxy :

Dépoussiérez avec un chiffon non abrasif sec ou légèrement humide.



ATTENTION !

1. Les détergents agressifs peuvent endommager les surfaces.
2. Vérifiez que toutes les parts du fauteuil soient parfaitement sèches avant d'utiliser le fauteuil après le nettoyage.
3. Les couleurs claires ne doivent pas toucher tissus et vêtements sur lesquels ont été utilisés des colorants non complètement fixés afin d'éviter tâches et auréoles de colorant qui peut-être ne peuvent pas être éliminés.

ACCESSOIRES ET COLORIS

CODE	DESCRIPTION
129020	Porte rouleau drap d'examen
120060	Drap d'examen à deux plis largeur cm 60 longueur mt 65
129030	Appuie-tête
NUANCIER	
Châssis en métal	Gris argent
Sellerie	Crème, jaune, orange, bordeaux, vert, bleu, gris et noir

[illegible]